

機械器具 42 医療用剥離子

一般医療機器 歯科用起子及び剥離子 JMDN コード:70683000

チタン エレベーター

【形状・構造及び原理等】

品番	種類
TE003	チタン エレベーター

成分:チタン

基本的形状:



【使用目的又は効果】

本品は、口腔内手術で骨膜、粘膜等の組織の剥離または口腔内の補綴物、異物等の除去に用いる器具で、口腔内の軟組織の剥離等に用いる。

歯科用起子及び剥離子の定義:

口腔内手術で骨膜、粘膜等の組織の剥離または口腔内の補綴物、異物等の除去に用いる器具をいう。ただし、電動式ものを除く。

【使用方法等】

- 使用前後に必ず洗浄・滅菌を行うこと。【保守・点検に係る事項】参照
- 手指で把持し、その先端にて軟組織の剥離に用いる。

【使用上の注意】

- 重要な基本的注意
  - 使用前に必ず滅菌を行うこと。
    - 滅菌方法
      - 残留した洗剤や水道水中の含有鉱物を除去するために、エチルアルコールを注ぐ。この操作は腐食や白い斑点を予防するために重要である。
      - 外装が破損し器具が汚染されるのを防ぐため、紙や滅菌対応のバッグで包む。
      - 132℃～135℃で 20～40 分間高圧蒸気滅菌を行う。
      - 器具を 30 分間乾燥させる。ただし、乾燥時間は滅菌する物の量によって多少の違いがある。
  - 折損、変形などの原因になるため必要以上の力を加えないこと。
  - 本品が術野内等で破損し、体内に破損片が残存した場合、腐食やアレルギー、感染症を引き起こす可能性がある。取扱いには十分に注意し、破損片を必ず体内から除去すること。
- 不具合・有害事象  
本品の使用により、以下のような不具合・有害事象が発生した場合には、直ちに適切な処置を行うこと。
  - 不具合
    - 変形、破損、磨耗
  - 有害事象
    - 本製品の分解及び破損により起こる作業者の損傷。
    - 本品の不十分な洗浄、滅菌に起因する感染。

【保管方法及び有効期間等】

- 貯蔵・保管方法
  - 室温保管

【保守・点検に係る事項】

- 使用前後の洗浄・滅菌方法
  - 洗浄方法
    - 使用后、有機質分解剤液の入った容器に入れる。
    - 目に見える破片を除去するため、柔毛のブラシでブラッシング洗浄し、から水道水で最低2 分間すすぐ。
    - 防錆剤薬液の入った超音波洗浄器で5分間超音波洗浄する。柔毛で再度ブラッシング洗浄する。
    - 器具を1分間水道水ですすぎ洗いする。

- 骨片や破片が残っていないか目視検査し、必要に応じて再度洗浄する。
- 滅菌方法
    - 残留した洗剤や水道水中の含有鉱物を除去するために、エチルアルコールを注ぐ。この操作は、腐食や白い斑点を予防するために重要である。
    - 外装が破損し器具が汚染されるのを防ぐため、紙や滅菌対応のバッグで包む。
    - 132℃～135℃で 20～40 分間高圧蒸気滅菌を行う。
    - 器具を 30 分間乾燥させる。ただし、乾燥時間は滅菌する物の量によって多少の違いがある。

※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

ジンヴィ・ジャパン合同会社  
東京都新宿区市谷本村町 1-1 住友市ヶ谷ビル 2 F  
電話：03-4333-9900

製造業者

ZimVie US Corp LLC.  
アメリカ合衆国