

機械器具 58 整形用機械器具

一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 JMDN コード:70757000

3 i ポリッシング プロテクター

【形状・構造及び原理等】

品番	種類
PPSA3	スタンダード ポリッシング プロテクター
PPMC1	コニカル ポリッシング プロテクター φ 3.4 mm 用
PPCA3	コニカル ポリッシング プロテクター φ 4.1 mm/φ 5.0 mmインプラント用
WCPP6	コニカル ポリッシング プロテクター φ 6.0 mm インプラント 用
PPMM1	インプラント ポリッシング プロテクター φ 3.4 mm
PPIA3	インプラント ポリッシング プロテクター φ 4.1 mm
WPP50	インプラント ポリッシング プロテクター φ 5.0 mm
WPP60	インプラント ポリッシング プロテクター φ 6.0 mm

成分:ステンレススチール

基本的形状:



PPSA3



PPCA3

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具で、補綴物等の研磨を行う場合に、アバットメントやゴールドシリンダーの底面部を保護するために用いる。

歯科インプラント技工用器材の定義:

歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具・材料をいう。

【使用方法等】

1. 使用するアバットメントに適した種類及びサイズの本品を選択する。
2. 補綴物等の研磨時にアバットメントやゴールドシリンダーの底面部にネジ止めする。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - 1) 使用前に製品の状態を確認し、欠損などの問題がある場合には使用しないこと。
 - 2) 折損、変形などの原因になるため必要以上の力を加えないこと。
2. 不具合・有害事象

本品の使用により、以下のような不具合・有害事象が発生した場合には、直ちに適切な処置を行うこと。

 - 1) 不具合
 - ・変形、破損、磨耗
 - 2) 有害事象
 - ・本製品の分解及び破損により起こる作業者の損傷。

【保管方法及び有効期間等】

貯蔵・保管方法
・室温保管

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

ジンヴィ・ジャパン合同会社

東京都新宿区市谷本村町 1-1 住友市ヶ谷ビル 2 F

電話 : 03-4333-9900

製造業者

ZimVie US Corp LLC.

アメリカ合衆国