

ラッピング ツール(2)

【形状・構造及び原理等】

品番	種類
LPCAMI	3i ロープロファイル アバットメント ラッピング ツール

成分:ステンレススチール (ガイド部:デルリン)

基本的形状:



LPCAMI

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具・材料で、アバットメントのインプラント接合面を研磨するために用いる。

歯科インプラント技工用器材の定義:

歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具・材料をいう。

【使用方法等】

研磨材を塗布した本品を技工用モーターに接続してアバットメントの底面を研磨する。ガイドは上部構造のアクセスホールから差し込み使用する。

【使用上の注意】

不具合・有害事象

本品の使用により、以下のような不具合・有害事象が発生した場合には、直ちに適切な処置を行うこと。

- 1) 不具合
 - ・変形、破損、磨耗
- 2) 有害事象
 - ・本製品の分解及び破損により起こる作業者の損傷。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

・室温保管

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者

ジンヴィ・ジャパン合同会社

東京都新宿区市谷本村町 1-1 住友市ヶ谷ビル 2 F

電話 : 03-4333-9900

製造業者

ZimVie US Corp LLC.

アメリカ合衆国