

機械器具 58 整形用機械器具

一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 JMDN コード:70757000

3 i スキャンキャップ

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】


品番	種類
SCNBS35	LDA スキャンキャップNBR 3.5mm
SCRNBS1H	LDA ヘクストスクリューNBR 3.5mm
SCNBS43	LDA スキャンキャップNBR 4.3mm
SCNBS50	LDA スキャンキャップNBR 5.0mm
SCNBS60	LDA スキャンキャップNBR 6.0mm
SCRNBS2H	LDA ヘクストスクリューNBR 4.3-6.0mm
SCSBL3	LDA スキャンキャップSBL 3mm
SCRSL1H	LDA ヘクストスクリューSBL 3mm
SCSBL4	LDA スキャンキャップSBL 4mm
SCRSL2H	LDA ヘクストスクリューSBL 4mm
ISC3	サーテン スキャンキャップ 3.4mm (注1)
ISC4	サーテン スキャンキャップ 4.1-6.0mm (注1)
SC3	スキャンキャップ 3.4mm (注2)
SC4	スキャンキャップ 4.1-6.0mm (注2)

成分:チタン合金

注1:サーテンチタンヘクストユニスクリューが付属する。

注2:チタンヘクストユニスクリューが付属する。

基本的形状:

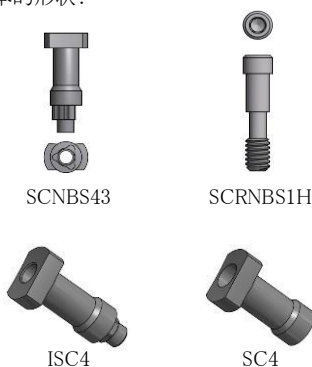

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具で、CAD/CAMシステムを用いてアバットメントをデザインする際にアナログに取り付け、スキャナーにインプラントの情報を伝えるために用いる。

歯科インプラント技工用器材の定義:

歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具・材料をいう。

【使用方法等】

- 治療計画に従った、もしくは埋入されたインプラントに適した種類及びサイズの本品を選択する。
- 模型に取り付けたアナログに本品を取り付ける。
- スクリューでスキャンキャップをネジ止めする。
- スキャナーで模型をスキャンする。

【使用上の注意】

- 重要な基本的注意
 - 折損、変形などの原因になるため必要以上の力を加えないこと。

2. 相互作用

(1)[併用禁忌・禁止](併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
当社の指定する以外の製品	本製品は当社が指定する製品と組み合わせて使用するよう設計されている。正しく機能しないため、指定外の製品とは組み合わせて使用しないこと。	指定外の製品との併用を想定していない。

2. 不具合・有害事象

本品の使用により、以下のような不具合・有害事象が発生した場合に、直ちに適切な処置を行うこと。

- 1) 不具合
 - ・変形、破損、磨耗
- 2) 有害事象
 - ・本製品の分解及び破損により起こる作業者の損傷。

【保管方法及び有効期間等】

- ・室温保管
- ・水等の液体の影響を受けない場所に保管すること。
- ・湿度の高い場所や直射日光の当たる場所を避けて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前に変形、破損及び磨耗等がない事を確認する。

※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

ジンヴィ・ジャパン合同会社
東京都新宿区市谷本村町1-1 住友市ヶ谷ビル2F
電話:03-4333-9900

製造業者

バイオメット スリーアイ インク(Biomet 3i Inc.)
アメリカ合衆国