



【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品を血液吸引に使用しないこと。
- (2) 本品は成人用であるが、使用前に適合性を確認すること。
- (3) 本品の取り扱いには十分注意し、術野内で破損した場合は破損片を必ず体内から除去すること。[体内に破損が残存した場合、腐食やアレルギー、感染症を引き起こす可能性があるため。]
- (4) 本品を曲げる、曲げ戻す等変形したり、傷をつけたりしないこと。[破損する危険性が高くなるため。]
- (5) 準備中や操作中に異常や損傷等を認めた場合は手技を中断すること。[組織の損傷や本品の破損等が生じる可能性がある]

2. 不具合・有害事象

冠動脈バイパス術等で、以下の不具合・有害事象が起こる可能性がある。

- (1) 心筋損傷
- (2) 出血

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- (1) 高温、多湿、及び直射日光を避けて保管すること。
- (2) 清潔で乾燥した場所に荷重のかからない状態で保管すること。
- (3) 化学薬品、有機溶剤等の保管場所や腐食性ガスの発生する場所には保管しないこと

2. 使用期限

製造業者のラベルに表示された使用期限による

【保守・点検に係る事項】

[使用者による保守点検事項]

使用前に本品に汚れ、変形、傷、破損等がないか、外観に異常がないか点検を行うこと。

【主要文献及び文献請求先】

(文献請求先)

株式会社バイタル 企画薬事部

Tel: 03-3458-1261

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社バイタル

Tel：03-3458-1261

製造業者：VMS Corporation

国名：大韓民国