

機械器具 12 理学診療用器具
高度管理医療機器 白内障・硝子体手術装置 JMDN コード：70652000

「コンパクト intuitiv」の付属品

再使用禁止

ディスプレイダブルパック (OPO80)

【禁忌・禁止】


使用方法

- (1) 再使用禁止。
- (2) 再滅菌禁止。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

- (1) チューブカセット

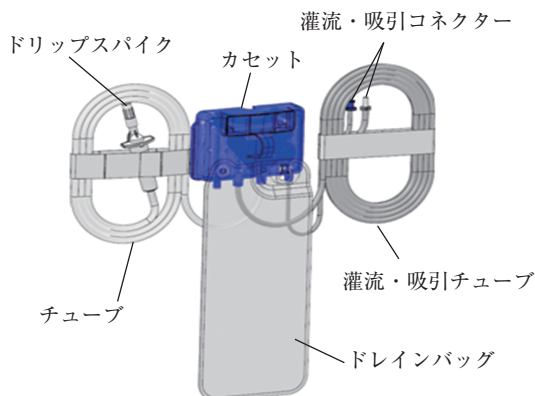

- (2) テストチャンパー



- (3) モニターカバー



**2. 原材料

チューブカセット
カセット : ABS 樹脂、シリコン、合金
ドリップスパイク : ABS 樹脂、シリコン、ポリ塩化ビニル※
灌流・吸引チューブ : ポリ塩化ビニル※
灌流・吸引コネクター : ABS 樹脂
チューブ : ポリ塩化ビニル※
※可塑剤：トリメリット酸トリス (2-エチルヘキシル) を使用

【使用目的又は効果】

白内障手術及び/又は硝子体手術に用いる眼内手術用複合機器であり、灌流、吸引、水晶体破碎、硝子体切除、ジアテルミーの機能を備える。

【使用方法等】

1. 使用方法

本品は灌流吸引チューブであり、本体に接続し、同装置の操作方法に従い使用する。詳細は本体の取扱説明書等を参照すること。

2. 組み合わせて使用する医療機器

本品は組み合わせて使用する機器があるので、詳細は本体の取扱説明書等を参照すること。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

使用中、灌流・吸引チューブの折れ曲がり注意到。〔灌流不全により前房虚脱のおそれがある〕本体の添付文書も参照すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温、多湿、直射日光及び水濡れを避け、室温で保管すること。

2. 有効期間

3 年〔自己認証による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】

エイエムオー・ジャパン株式会社
電話：03-4411-4902

【製造業者】

ジョンソン・エンド・ジョンソン サージカル ビジョン社
Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. アメリカ合衆国