

類別及び一般的名称： 歯科材料 7 歯科用ワックス
歯科用キャストイングワックス
一般医療機器 (JMDN コード：16189000)

販売名： オクループラス

【形状・構造等】

1) 成分

着色用粉体と高圧エアゾールガス

2) 構造

粉体と高圧エアゾールガスとの混合体のスプレー容器に充填。



【性能、使用目的、効果又は効能】

本製品は、金属、レジン等の表面に添加する粉体で、高圧エアゾールの噴射に助けられて任意の部位の適合、不適合を確認する手段に応用でき、金属冠に添加する診断用カラーワックス等の応用に準じる。

【操作方法又は使用方法等】

本品は主として鑄造体表面に添加するため、金属面にワックスアップして二重冠を作るワックスとか、金属又は樹脂製の暫間歯冠面に添加して審美性を診断するカラーワックス等の目的と同等の使用に供するため、「歯科用キャストイングワックス」に準じる援用とした。操作方法は、添付されているノズルを押すことにより、検査対象に噴霧する。

【使用上の注意】

- (1) 歯科用レジン、合金、陶材を対象とした適合検査以外の工程に使用しないこと。
- (2) 口腔内で使用する咬合紙とは異なり、唾液等の液で簡単に着色が落ちてしまうので利用できません。
- (3) 経済産業省より法制化されたエアゾール製品の輸入試験検査にもとづき火気厳禁、貯蔵・管理等の注意事項を遵守すること。
- (4) 噴霧と研削作業に伴う粉塵の人体への影響を避けるため、局所的吸塵装置、公的機関の認可した防塵マスク等の措置を講じること。

置を講じること。

- (5) 歯科医師、歯科技工士以外は使用しないこと。

- (6) 反復使用による劣化、変質に注意し、適宜新品と交換使用のこと。

【作動・動作原理】

噴霧された粉体が金属鑄造体、レジン体に着色して適合を検査するのを助ける。二重鑄造冠、金属床体部への等への適合構造を検査できる。

【貯蔵・保管方法及び有効期間等】

貯蔵方法：高温、多湿、直射日光を避け常温で保管。

有効期間：消耗、劣化により適宜新品交換。

【取り扱い上の注意】

- (1) 火気に注意
- (2) 換気に注意
- (3) 目や口に入らないように注意
- (4) 使用目的以外には使わないように注意
- (5) 保管場所が高温にならないように注意

【保守・点検にかかわる事項】

容器に表示されている使用上の注意を必ず読んで正しく使用すること。

【包装】

1 本入り

【製造販売業者の名称及び住所等】

有限会社ハナケン
〒113-0034 東京都文京区湯島 4-6-12 湯島ハイタウン
Tel.03-5802-0490
輸入先国名：ドイツ
輸入先企業名：ハーガー・ヴェルケン社