

機械器具 69 歯科用蒸和器及び重合器
一般医療機器 歯科技工用重合装置
JMDN コード：35761000
スプリントレイキュアー

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

〔外観〕

各部の詳細は取扱説明書を確認のこと



寸法：幅 28 x 奥行 28 x 高さ 28（cm）

重量：7（kg）

2. 仕様

電源：100-240V

定格電流：3A

定格電圧：100VA

光源：405nm LED 最大 LED 電力：90 ワット

照射時間：～60 分（マニュアル設定時）

照射温度：～60 度（マニュアル設定時）

接続方法：有線 LAN、無線 LAN、外部 USB

使用環境：室内にて水のかからない場所にて設置し、気圧、温度、湿度、日光、ほこり、塩分、イオウなどを含んだ空気などにより悪影響を生ずる恐れのない環境で使用する。平坦な場所に設置すること。

3. 原理

歯科技工室で、高分子材料を重合するために用いる装置をいう。過熱、加圧、光、またはこれらを組み合わせて重合を行う。

【使用目的又は効果】

本品は、歯科技工室で光重合型高分子材料の重合に使用する。

【使用方法等】

設置方法や操作方法については、取扱説明書を必ず参照してください。

使用方法

1. 使用前準備

- 1) 本体を日光の当たらない換気の良い水平な場所に設置する。
- 2) 本体に電源プラグを差し込み、コンセントに繋ぎ、本体の背面にある電源を入れてください。
- 3) プリントされた重合物（モデル）を洗浄後本器に入れ、扉を開め、照射時間を選択します。

終了するとメッセージが表示されるので、扉を開け、重合物を取り出します。

- 4) 作業が終了したら電源を切ります。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

1. 照射中には扉を開けないこと。扉が完全に閉まらないと照射は始まらないようになっていますが、必ず確認をして使用すること。
2. 本体上部には換気口があります。換気口を塞がないで下さい。
3. 照射が終わった後も、熱を持ち続けることがあるので、十分に気を付けて操作をすること。

【使用上の注意】

詳細な設置情報や使用方法については使用前に取扱説明書を必ずお読みください。

1. 引火性のものや可燃物の近くに置かないこと
2. 担当者以外は触らないこと
3. 使用しない時は電源コンセントを抜くこと。
4. 上部に物を置いたり、上部の換気口を塞がないこと。
5. 本品は精密機器であるため、分解、修理改造を行わず、取扱には十分に注意すること。
6. 異常発生又は故障したときは、使用せず電源プラグをコンセントから抜き、販売元にご連絡ください。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

1. 水がかからず、傾斜、振動、衝撃等が加わらず、高温や窓際、UVライトの近く、直射日光が当たらず、温度や湿度等も安定した場所に保管すること
2. 化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所に保管しない。
- 3 関係者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

詳細については、【取扱説明書】を必ず参照してください。

- ・使用者による清掃及び保守点検事項は、【取扱説明書】に従って行うこと。
- ・医療機器の管理責任は所有者（病院、診療所、医療機関）側にあります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名：有限会社バルビゾン

連絡先電話：047-460-7818

製造業者：スプリントレイ

SprintRay

国名：アメリカ

販売元：株式会社エイトサブライ

連絡先電話：052-931-6518

e-mail：info@8s-ow.com

必ず取扱説明書等を必ずご参照ください。