

機械器具42 医療用剥離子  
一般医療機器 歯科用起子及び剥離子 70683000

## コンバーチブルキャップリムーバー

### 【禁忌・禁止】

本品に変形等が見られた場合は使用しないこと。

### 【使用上の注意】

#### 1) 使用注意

(1) 使用前に洗浄・滅菌すること。

【洗浄】血液・体液が付いた器具は放置すると汚れを除去しづらくなるため、使用後はただちに防錆洗浄液(YDM社ゼットワンecoファインリキッド等)を用いて洗浄すること。

※家庭用洗剤は金属が錆びやすくなるため、使用しないこと。

※クレンザー、金ブラシ、金属ウールは錆・キズの原因となるため使用しないこと。

#### 【滅菌】

※加熱不飽和ガスによる滅菌は金属を錆びさせるため行わないこと。

※煮沸消毒、プラズマ滅菌、超酸性水や次の薬剤の使用は、素材を腐食・変質・変色させる恐れがあるため行わないこと。《次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドンヨード、ホルマリン、フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン、過酢酸》

※洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。

※洗浄・滅菌後の器具は錆・変色を防ぐため、十分に乾燥させてから保管すること。

(2) 使用に際しては、本品に変形・破折・錆がないか確認し、異状がある場合は使用しないこと。

(3) 打刻等の二次加工を行うことは、破損の原因となるため行わないこと。

(4) コンバーチブルキャップを外す際は、誤飲・誤嚥が起きないように、十分に注意すること。

#### 2) 重要な基本的注意

万が一誤飲・誤嚥が起きたときは、ただちに適切な病院へかからせること。

### 【形状・構造及び原理等】

本品は矯正歯科治療に際し、歯列矯正用チューブのコンバーチブルキャップを除去するために用いる機器である。

### 【使用目的又は効果】

本品は矯正歯科治療に際し、歯列矯正用チューブのコンバーチブルキャップを除去するために用いる機器である。

### 【使用方法等】

(1) 使用に先立ち、滅菌を施す。

(2) 歯列矯正用チューブ(コンバーチブルタイプのもの)のメインスロットに本品の先端を当て、ゆっくりコンバーチブルキャップを押し上げる。

(3) プライヤー等を用いて押し上げたコンバーチブルキャップを取り外す。

(4) 使用後は再滅菌を行い、繰り返し使用する。

※滅菌の方法:オートクレーブ滅菌(132度、5分)による。

#### (替刃の交換方法)

(1) プライヤー等を用いて古くなった替刃を取り外す。

(2) 替刃の方向を確認し、プライヤー等を用いてハンドル部に装着する。

(3) 装着した替刃にぐらつき等の異状がないことを確認してから滅菌を行う。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

|       |                                            |
|-------|--------------------------------------------|
| 製造販売  | : 株式会社バイオデント                               |
| 電話番号  | : 03-5604-0980                             |
| FAX番号 | : 03-3801-7560                             |
| 輸入先国名 | : アメリカ合衆国                                  |
| 製造業者  | : American Orthodontics<br>アメリカンオーソドンティックス |

100-700

100-701