

ピンセット

【禁忌・禁止】*

本品に変形等が見られた場合は使用しないこと。

【使用上の注意】**

1) 使用注意

(1) 使用前に洗浄・滅菌すること。

【洗浄】血液・体液が付いた器具は放置すると汚れを除去しづらくなるため、使用後はただちに防錆洗浄液（YDM社ゼットワンecoファインリキッド等）を用いて洗浄すること。

※家庭用洗剤は金属が錆びやすくなるため、使用しないこと。

※クレンザー、金ブラシ、金属ウールは錆・キズの原因となるため使用しないこと。

【滅菌】

※加熱不飽和ガスによる滅菌は金属を錆びさせるため行わないこと。

※煮沸消毒、プラズマ滅菌、超酸性水や次の薬剤の使用は、素材を腐食・変質・変色させる恐れがあるため行わないこと。◀次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドンヨード、ホルマリン、フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン、過酢酸▶

※洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。

※洗浄・滅菌後の器具は錆・変色を防ぐため、十分に乾燥させてから保管すること。

(2) 使用に際しては、本品に変形・破折・錆がないか確認し、異状がある場合には使用しないこと。

(3) 打刻等の二次加工を行うことは、破損の原因になるため行わないこと。

2) 重要な基本的注意

本品が治療中に破折を起こすと誤飲・誤嚥につながる可能性がある。誤飲・誤嚥が起きたときは、ただちに適切な病院へかからせること。

【形状・構造及び原理等】

本品は矯正歯科治療に際し、ブラケット、チューブ、その他の材料を保持するのに用いるピンセットである。

【使用目的又は効果】*

本品は矯正歯科治療に際し、ブラケット・チューブ等を保持するピンセットである。

【使用方法等】

- (1) 使用に先立ち、滅菌を施す。
- (2) 先端でブラケット、チューブ等を保持する。
- (3) 使用後は再滅菌を行い、繰返し使用する。
再滅菌の方法:オートクレーブ滅菌(132度、5分)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売 : 株式会社バイオデント
電話番号 : 03-5604-0980
FAX番号 : 03-3801-7560
輸入先国名 : アメリカ合衆国
製造業者 : American Orthodontics
アメリカンオーソドンティックス

001-100
001-800S
001-100A
001-100F
001-100M