

(**)2017 年 8 月 1 日改訂第 3 版（新記載要領に基づく改訂）

(*)2012 年 10 月 25 日改訂第 2 版（外国製造業者名の変更）

2006 年 5 月 8 日作成

届出番号 27B3X00105010007

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000
ポリラインポリッシングペースト

【形状・構造及び原理等】

この商品は、筒状の容器にクリーム状の研磨剤が入っています。



メーカー型番：9645

〔成分〕

酸化アルミニウム、脂肪酸、その他

〔原理〕

回転するバフに本研磨剤を付着させてから、研磨する歯科材料に接触させると、砥粒である酸化アルミニウムにより歯科材料の微細な凸部が削られていき、最終的に凹凸がほとんど無くなりツヤが出ます。

(**)【使用目的又は効果】

コンポジット、アクリル、コバルトクローム、チタン等の歯科材料の研磨が出来ます。

(**)【使用方法等】

回転しているバフに本研磨剤を軽く押し付けて付着させます。そして研磨したい歯科材料をバフに押し当てて研磨してください。

【使用上の注意】

●使用する時は、保護メガネ・防塵マスクを着用してください。

(**)【保管方法及び有効期間等】

腐食性薬剤、汚染のないところに保管してください。
火気を避けてください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社ハープ

〒581-0052 大阪府八尾市竹濑 2-9-8

電話 06-6790-4781

(*)外国製造業者：BUSCH & CO. GmbH & Co. KG（ドイツ）