

(**)2017 年 8 月 1 日改訂第 3 版（新記載要領に基づく改訂）

(*)2012 年 10 月 25 日改訂第 2 版（外国製造業者名の変更）

2006 年 5 月 8 日作成


届出番号 27B3X00105010009

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000

ポリラインセーム革バフ

【形状・構造及び原理等】

この商品は、円盤状に切り抜いたセーム革を数枚重ねて金属板で挟んだものです。セーム革の部分が「作業部」になります。

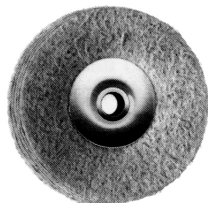

メーカー型番
9642/220

作業部の直径は約 22mm あり、中央の穴の直径は 1.7mm です。

〔原理〕

本商品をモーター等で回転させ歯科材料に押し付けると、作業部のセーム革の超微細な繊維が遠心力によって打ち付けられ研磨することができます。

(**)【使用目的又は効果】

歯科材料の最終仕上げの研磨ができます。

(**)【使用方法等】

本商品の中央の穴でマンドレルに装着します。そしてマンドレルごと歯科技工用ハンドピースに装着して、回転させてください。

【使用上の注意】

- 使用する時は、保護メガネ・防塵マスクを着用してください。
- 欠けたり、芯のブレているものは使用しないでください。
- 無理な角度、過度の加圧での使用は避けてください。
- ハンドピース又は歯科技工用機器のチャックに奥まで挿入し、確実に取り付けられている事を確認してください。
- 最高許容回転数以内で使用してください。（最高許容回転数は商品に表示）

(**)【保管方法及び有効期間等】

水分、腐食性薬剤、汚染のないところに保管してください。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社ハープ

〒581-0052 大阪府八尾市竹濑 2-9-8

電話 06-6790-4781

(*)外国製造業者：BUSCH & CO. GmbH & Co. KG（ドイツ）