

鑷子 (navis)

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

1. 使用目的以外に使用しないこと。
2. 本品は改造しないこと。〔破損の恐れがある。〕
3. 電気メスを用いた接触凝固は行わないこと。〔術者が感電・熱傷の危険又は器具を損傷する可能性がある。〕

【形状・構造及び原理等】

＜概要＞

本品は再使用可能な医療用ピンセットである。
2 枚の先端部を閉じることによって、組織又は器具・機器等を挟んで保持する。

* 代表的製品：



ピンセット (小波) (navis)



アドソン 鑷子 (navis)



ルーツェ 鑷子 (navis)

種類名及び寸法はラベルに記載のとおり。

＜原材料＞

ステンレス鋼、タングステンカーバイト (超硬チップ部)

【使用目的又は効果】

本品は再使用可能な医療用ピンセットであり、組織又は器具・機器等を挟んで保持するために使用する。

一般的名称の定義：

保持する物体を閉じて挟む 2 枚の刃をもつ手術器具をいう。ハンドルは永久的に結合している。この器具のグループには、すべての手術用ピンセット、マイクロピンセット及び手術用ツイザーが含まれる。

【使用方法等】

1. 使用前に、必ず洗浄・滅菌する。
132℃/ 5 分以上を条件とした高圧蒸気滅菌を推奨する。
2. 親指と人差し指等を用いて握ると 2 つの保持面は閉じる。開くときには握る力を弱める。〔潜在的なバネの反発力を利用する。〕

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 本品をクロイツフェルト・ヤコブ病 (CJD) 患者、又はその疑いのある患者に使用した場合は、クロイツフェルト・ヤコブ病 (CJD) に関する国内規制及びガイドライン等を遵守すること。
2. 本品は、器具、使用目的及び手術手技を熟知した医師のみが使用すること。
3. 使用者は、使用前に本品の外観を確認し、汚れ、損傷等の異常がないことを確認すること。

＜その他の注意＞

1. 器具を保護する保守油が塗布されているので、適切な油除去を行ってから滅菌処理を行うこと。〔油が付着したまま高圧蒸気滅菌を行うと、器具が変色する可能性がある。〕

【保管方法及び有効期間等】

＜貯蔵・保管方法＞

1. 品質保持のため、高温、多湿、直射日光の当たる場所を避け常温で清潔な場所に保管すること。
2. 損傷の原因となりうる保管方法は避けること。
3. 滅菌した状態で保管する場合、滅菌有効期限を管理すること。

【保守・点検に係る事項】

＜洗浄・消毒及び滅菌＞

1. 汚れが乾燥し落ちにくくなるのを防ぐため、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに洗浄し、消毒すること。
2. 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、その適正濃度と取扱方法を守ること。中性洗剤の使用を推奨する。
3. 超音波洗浄装置・ウォッシャーディスインフェクター等の洗浄装置で洗浄する場合、汚れが落ちやすい状態でバスケット等に収納して処理すること。
4. 金属タワシ、クレンザー (磨き粉) 等は、器具表面を損傷するので使用を避けること。
5. 仕上げすぎには、精製水・脱イオン水・濾過水等の使用を推奨する。
6. 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥させること。

＜点検＞

1. 使用前、滅菌前及び必要に応じて、破損・変形等の異常がないか確認する。
2. 修理に関しては、弊社又は弊社の許可を得ている修理業者以外には行わないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

林刃物株式会社
〒501-3246 岐阜県関市緑ヶ丘 2-3-7
電話 0575-22-3344 FAX 0575-22-9810

＜製造業者＞

IAA Surgical Instruments Company (パキスタン)

＜販売業者＞

アズワン株式会社
〒550-8527 大阪市西区江戸堀 2-1-27
フリーダイヤル 0120-711-875 (カスタマー相談センター)