

機械器具 12 理学診療用器具 一般医療機器 温熱用パック 37240010
温ったか毛布

【禁忌・禁止】

次のような人は使用しないでください。

- ・心臓疾患のある人
- ・有熱性疾患、化膿性疾患
- ・感染症、悪性腫瘍
- ・急性炎症、急性疾患
- ・極度の衰弱時
- ・知覚障害、皮膚疾患のある人
- ・アトピーなどによる知覚、皮膚過敏症

【形状・構造及び原理等】

1.1 形状、構造



寸法

型式	サイズ	幅	長さ	厚さ
HB002	SS	700	1,000	10
HB003	S	900	1,400	10
HB004	M	1,000	1,900	10
HB005	L	1,400	2,000	10

(単位: mm)

1.2 原理

本品にナノセラミックを定着させ、強力な遠赤外線を放出する。

【使用目的又は効果】

温熱治療効果

- ①血行促進。
- ②疲労回復。
- ③筋肉の疲れ・こりの緩和。
- ④神経痛、筋肉痛の緩和。
- ⑤胃腸の働きを活発にする。

【使用方法等】

- ・本品は再使用可能である。
- ・本品に破損がないことを確認する。
- ・身体に掛ける

【使用上の注意】

- ・湿疹、かぶれ、傷口など皮膚に異常があるときは使用しないでください。
- ・体質によってかゆみ、かぶれ、発疹などをおこすことがあります。
- ・特に繊維アレルギーのある方はご注意ください。
- ・異常を感じたらご使用をおやめください。
- ・洗濯は水温30度以下でお願いします。(中性洗剤をご使用ください)
- ・熱湯で洗わないでください。
- ・乾燥機のご使用は避けてください。
- ・ドライクリーニングは避けてください。
- ・漂白剤は使用しないでください。
- ・脱水はネットに入れて短めに(水が切れる程度で)おかけください。
- ・アイロンをかける場合は、低温でお願いします。
- ・素材の特性上、色落ちする場合がありますので、他のものと分けて洗濯してください。
- ・素材の特性上、洗った後に若干縮む場合がございます。

【保管方法及び有効期間等】

- ・高温、多湿な環境を避けて保管してください。
- ・時々、日に干し乾燥させてください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売および製造業者: 株式会社ハーメック

問合せ先 TEL: 0276-30-4020

FAX: 0276-30-4021