

機械器具 12 理学診療用器具
一般医療機器 温熱用パッド 37240010
ブランケット プラス エム


【禁忌・禁止】

次のような人には使用しないこと

- ・ 心臓疾患のある人
- ・ 有熱性疾患、化膿性疾患
- ・ 感染症、悪性腫瘍
- ・ 急性炎症、急性疾患
- ・ 極度の衰弱時
- ・ 知覚障害、皮膚疾患のある人
- ・ アトピーなどによる知覚、皮膚過敏症

【形状・構造及び原理等】

1.1 形状、構造

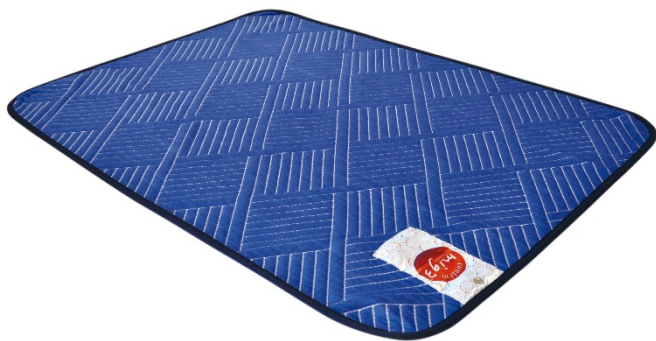

寸法

小：80cm（幅）×110 cm（長さ）

大：140cm（幅）×200 cm（長さ）

1.2 原理

本品にパイオセラミックを定着させ、強力な遠赤外線（特に生育光線）を放出する。

【使用目的又は効果】

温熱治療効果

- ①血行促進。
- ②疲労回復。
- ③筋肉の疲れ・こりの緩和。
- ④神経痛、筋肉痛の緩和。
- ⑤胃腸の働きを活発にする。

【使用方法等】

- ・ 本品は再使用可能である。
- ・ 本品に破損がないことを確認する。
- ・ 身体に掛ける

【使用上の注意】

- ・ 湿疹、かぶれ、傷口など皮膚に異常があるときは使用しないでください。
- ・ 体質によってかゆみ、かぶれ、発疹などをおこすことがあります。特に繊維アレルギーのある方はご注意ください。異常を感じたらご使用をおやめください。
- ・ 洗濯は水温30度以下でお願いします（中性洗剤をご使用ください）。

- ・ 熱湯で洗わないでください。
- ・ 乾燥機のご使用は避けてください。
- ・ ドライクリーニングは避けてください。
- ・ 漂白剤は使用しないでください。
- ・ 脱水はネットに入れて短めに（水が切れる程度で）おかけください。
- ・ アイロンをかける場合は、低温でお願いします。
- ・ 素材の特性上、色落ちする場合がありますので、他のものと分けて洗濯してください。
- ・ 素材の特性上、洗った後に若干縮む場合がございます。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 高温、多湿な環境を避けて保管すること。
- ・ 時々、日に干し、乾燥させること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ハーメック

製造業者：新潟大東紡株式会社

TEL: 0276-30-4020

FAX: 0276-30-4021

問い合わせ先：株式会社 アライヴン

TEL: 03-6380-7610

FAX: 03-6380-7600