

医療用品 04 整形用品
救急絆創膏
JMDN 34864000
一般医療機器

サージカル・バンデージ A

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

*【形状・構造及び原理等】

本品は、所定の大きさに切断した粘着シートの中央部に所定の大きさに切断した吸収パッドを貼着し、剥離シートにて覆った製品である。

*<各部の名称>

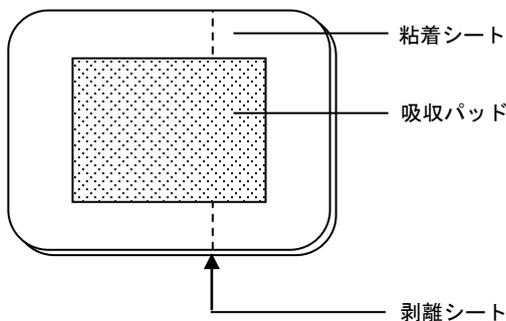

品番	全体サイズ (吸収パッドサイズ)
001612	50mm×65mm (25mm×40mm)
001614	110mm×100mm (50mm×40mm)
001616	110mm×150mm (50mm×90mm)

*<各部の組成>

- ・粘着シート : ポリエステル不織布、
ポリアクリル酸エステル系粘着剤
- ・吸収パッド : 有孔ポリエステルフィルム付
再生セルロース不織布
- ・剥離シート : 上質紙、ポリエチレン、シリコン

【使用目的又は効果】

本品は、傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

【使用方法等】

- (1) 創傷部を清潔にし、創傷部周囲をアルコールで消毒、脱脂し、乾燥させる。
- (2) 創傷部に合った吸収パッドサイズを選び、使用直前に滅菌バッグの開封部から本品を取り出す。
- (3) 2枚の剥離シートを両手で1枚ずつ持ち、引き剥がしながら吸収パッドを創傷部にあてる。
- (4) 除去する際は、端を少し持ち上げ、貼付面に対して180°逆方向に引っ張りながらはがす（上部に持ち上げるようにはがすと、皮膚を損傷させることがあるので注意すること）。

<使用方法に関連する使用上の注意>

- ・発赤、発熱、腫脹、疼痛等、感染の兆候がみられたときや、皮膚の異常がみられたときは、本品を除去し、適切な処置をすること。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・滅菌バッグを開封したらただちに使用し、使用後は感染防止に留意し安全な方法で処分すること。

*【保管方法及び有効期間等】

*<保管方法>

- ・水濡れ、直射日光、高温多湿を避けて室温で保管すること。

*<有効期間等>

- ・製造日より4年間（自己認証による）
- ・使用期限は外箱に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：バイリーンクリエイト株式会社

住所：東京都中央区築地5-6-4

電話番号：03-4546-1183