

医療用品 4 整形用品  
単回使用汎用サージカルドレープ  
JMDN 35531000  
一般医療機器

## 撥水オイフ

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

再使用禁止。

\*\* \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

#### 製造販売元

バイリークリエイト株式会社  
滋賀県守山市川田町1147番地  
電話番号：077-598-1011

#### 【形状・構造及び原理等】

1. 本品は、撥水不織布の四角巾を折りたたみ、滅菌バッグに入れ、シール部をヒートシールした後、エチレンオキサイドガス滅菌を施したディスプレイ製品である。
2. 本品は、四角巾に穴を有するものがあり、さらに、穴の周囲には粘着シートが貼付してあるものがある。

#### 【使用目的又は効果】

本品は、手術室やカテーテル処置室の汚染（器具やテーブルの上）から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる。

#### 【使用方法等】

1. 滅菌バッグを開封後、本品を取り出す。
2. 術野又は検査野に穴を粘着シートにより固定する。
3. 穴を術野又は検査野に固定後、本品の折りを広げ、患者の身体に覆いかぶせ使用する。

#### 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法  
室温にて保管すること。  
直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
2. 有効期間等  
製造日より3年間  
使用期限は包装に記載