

医療用品 4 整形用品
単回使用汎用サージカルドレープ
JMDN 35531000
一般医療機器

特殊ドレープ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止。

**** *【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元

バイリークリエイト株式会社
滋賀県守山市川田町1147番地
電話番号：077-598-1011

**【形状・構造及び原理等】

1. 本品は、撥水不織布、防水フィルム貼合せ不織布、あるいは不織布で防水フィルムを挟んだ3層複合材料の、四角巾を折りたたみ、滅菌バッグに入れ、シール部をヒートシールした後、エチレンオキサイドガス滅菌を施したディスポーザブル製品である。
2. 本品は、四角巾に穴、又はスリットを有し、穴、又はスリットの周囲には粘着シートが貼付してあるものがある。
3. 本品は、穴と重複しない部分に透明フィルムを貼り合わせるものがある。

【使用目的又は効果】

本品は、手術室やカテーテル処置室の汚染（器具やテーブルの上）から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる。

【使用方法等】

1. 滅菌バッグを開封後、本品を取り出す。
2. 術野又は検査野に穴を粘着シートにより固定する。
3. 穴を術野又は検査野に固定後、本品の折りを広げ、患者の身体に覆いかぶせ使用する。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
室温にて保管すること。
直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
2. 有効期間等
製造日より3年間
使用期限は包装に記載