

ワックスバー

【形状・構造及び原理等】

1. 材質

（JIS G4403）ステンレス鋼鋼材

2. 型番

型番	頭部径（mm）
No. 1	1. 2
No. 2	1. 6
No. 3	2. 1

3. 軸部形式

ストレートハンドピース用 全長 45. 0mm

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 有限会社 パーツール
住 所 〒354-0021
埼玉県富士見市鶴馬 3229-6
TEL・FAX 049-255-5355

【使用目的、効能又は効果】

スチール製の作業部をもち、歯科技工用ハンドピース等に装着し、金属、プラスチック、陶材、又は同種の材料を研削するために用いる研削器具をいう。

【使用上の注意】

1. 使用目的以外の用途には使用しないこと。
2. ハンドピースメーカーの指示に従って、バーを確実にチャック内に挿入し、半チャックでないことを確認すること。
3. ハンドピースの振れ又はガタがないことを確認すること。
4. あらかじめ口腔外で回転させ、バーの振れがないことを確認すること。
5. 切削の際に、過度の力をかけないように注意すること。
6. 目の損傷を防ぐために保護メガネ等を着用すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 高温、多湿、水濡れを避け、汚染ないように保管すること。
2. 歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管すること。
3. 廃棄する場合には、医療用廃棄物として適切に処分すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後は付着物を洗い流し、滅菌、消毒を行うこと。
2. 材料の性質上水分及び薬剤の付着により腐食を生じる場合があるので十分注意すること。

【包装】

3 本入り／プラスチックケース