

2021 年 6 月(第 1 版)

類別及び一般的名称等 医器 12 理学診療用器具／31724000 弾性ストッキング
一般医療機器

ヴェントレイン・マイクロ(届出番号 27B2X00262000033)

禁忌・禁止

以下の場合には装着不適応のため、装着しないこと

1. 進行性末梢閉鎖障害
2. 非代償性心筋不全
3. 敗血性静脈炎
4. 有痛性青股腫
5. 材質不適合反応
6. 発疹
7. 四肢の感覚障害(糖尿病など)

【形状・構造及び原理等】

形状種類は、膝までの高さ、大腿部までの高さ、腰部までの高さ、腰部上方までの高さの 4 種類。マイクロファイバーを高い割合で含む、きめ細やかなニット生地で製造されている。



【使用目的又は効果】

四肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防する事、静脈還流の促進を目的に使用する。末梢から中枢に向かい漸減的に圧迫を加える機能を有する。

【使用方法等】

*** 取扱説明書を必ず参照すること**

〔装着方法〕

踵部分まで本製品をを裏返しにし、両手でストッキングを広げ、甲へ被せ、踵の位置が合うように装着する。しわが出来ないように、少しずつ上方へ被せるように装着する。

【使用上の注意】

1. 本製品は医師の処方により使用すること。使用にあたっては取扱説明書に従うこと。
2. 尖った爪などで本製品を使用しないこと。装着時はアクセサリを取り外すこと。装着者の手や足が濡れていないこと。
3. シリコンボーダー部分を引っ張るなどして過度に本製品を伸ばさないこと。
4. 不適切な使用をした場合では、保証は適応外となる。
5. 軟膏、ローション、グリースなどが製品に付着しないように注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔貯蔵・保管方法〕

直射日光に当たらない涼しい場所にて保管

〔有効期間〕

1 年間(保証期間)

〔使用期間〕

医師の処方に従うこと

【取扱い上の注意】

1. 上質素材用洗剤を使用して、30℃以下のお湯または水を使用し、手洗いすること
2. 製品をねじらず 2 枚のタオルに挟む等して乾燥させること
3. ドライヤーや熱に直接当てないこと
4. アイロン、ドライクリーニングは行なわないこと
5. 1 日に 1 度はシリコンボーダーを拭くこと

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

バシフィックサプライ株式会社

072-875-8008(代)

外国製造所

Bauerfeind AG./ドイツ

取扱説明書等を必ずご参照下さい。