

機械器具 2 4 知覚検査又は運動機能検査用器具
一般医療機器 歩行分析計 3 5 7 5 7 0 0 0
ゲイトジャッジシステム G 2

【警告】

1. 分解・改造をしないでください。事故・火災・感電の原因になります。
2. 計測用ロードセルや六角レンチなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合には、ただちに医師に相談してください。
3. 部品内に異物が入った、煙が出る、変なにおいがしたときには、ただちに使用を中止して、お買い上げ店に相談してください。事故、火災、感電の原因になります。

【禁忌・禁止】

1. 各アタッチメントは、指定されている下肢装具以外には使用しないでください。破損の原因になります。
2. 本書に記載されている取扱手順以外の方法で使用しないでください。機器の破損の原因になります。
3. 直射日光のあたる場所や炎天下の車内に長時間放置するもしくは、熱器具（ストーブなど）の近くで使用しないでください。急に作動することや、熱により変色や変形する恐れがあります。
4. 付属の AC アダプター以外使用しないでください。機器の破損の原因になります。
5. AC アダプターから出ているコードは、歩行の障害にならないところに配置してください。コードでのつまずきの原因になります。
6. ケースの開け閉め時に指を挟まないように十分注意してください。けがの原因になります。
7. 機器の設置時に、アンテナの先端部には十分注意してください。けがの原因になります。
8. 本分析システムは、細かな部品から構成されているため、使用後はケースに収めてください。ケースに収めず放置した場合、部品を踏むことでの足部のけがや、部品の紛失の原因になります。

【形状・構造及び原理等】

下肢装具に取り付ける送信システムと、臨床現場で簡便に機能を確認できる受信システムの 2 つから構成される。

送信システムは、関節の角度情報を収集する装具アタッチメント、力を計測する計測用ロードセル、そして計測したデータを 100Hz（または 1000Hz）のデータとして受信システムに送信する無線ユニットからなり、受信システムは、通信用無線信号を Wi-Fi 信号に変更する Wi-Fi コンバータと、Wi-Fi 信号を受信する iPad® からなる。

iPad® 専用プログラムされたアプリケーションにより簡便な計測を行い、これらのシステムにより、装具の情報をリアルタイムに iPad® の画面に表示し、目視では確認が難しいロッカーファンクションを確認することができる。

**【使用目的又は効果】**

歩行又は走行に関連した問題の診断及び矯正措置計画の支援に用いる。

【使用方法等】

1. アタッチメントの取り付け
2. 通信準備
3. アプリケーションの起動
4. 計測手順
 - 4.1 モニタリング
 - 4.2 計測
 - 4.3 計測データの保存
5. データ再生
6. トレーニングモード
7. ファイル管理
8. 設定
9. PC へのデータ出力

【使用上の注意】

- ・電池が少ない状態での使用は不安定な計測となるため、しっかりと充電された状態でお使いください。
- ・本品は、精密な部品を用いて精密に組み立てられています。初期の性能を維持するために、やさしく丁寧な取り扱いをお願いいたします。
- ・お手入れは、乾いた布か水につけてから強く絞った布でふいてください。ベンジンやアルコール、シンナーなどの化学薬品は絶対に使用しないでください。
- ・水や水で薄めた中性洗剤を直接製品にかけないでください。液体が内部に入り、シミや故障の原因になります。
- ・可動部に無理な力をかけないでください。ケガや故障の原因になることがあります。
- ・室温の環境でお使いください。
- ・この取扱説明書に記載されているアプリケーションは、ライセンスの所有者のみに供給され、同ライセンスの許可する条件のもとでのみ使用することが許されます。
- ・当該ライセンスが許可している場合を除き、本出版物のいかなる部分も川村義肢株式会社及びパシフィックサプライ株式会社の書面による事前の許可無しには、いかなる条件下でも、また電子的、機械的、録音、その他いかなる手段によっても、コピー、記録または転送を行うことはできません。
- ・この取扱説明書に記載された内容は、情報の提供のみを目的にしており、予告無しに内容について変更されることがあります。
- ・仕様及び外観は、改良のために予告なく変更する場合があります。
- ・本説明書の写真やイラストは、撮影・印刷条件により実物と印象が相違する場合があります。
- ・本品は日本国内専用です。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

パシフィックサプライ株式会社
電話番号：072-875-8008