

器12 理学診療用器具
一般医療機器 弾性ストッキング (31724000)
ヴェノTrain コクーン

【禁忌・禁止】

以下の場合には装着前に医師に相談すること
使用にあたっては取扱説明書を必ず参照して下さい

1. 製品の装着部位に皮膚の疾患／疾病、特に炎症が見られる場合。同様に、腫れが伴い、傷が隆起している場合、または赤みや過度の発熱が見られる場合。
2. 損傷部位に知覚障害または循環障害がある場合。
3. リンパ機能に障害がある場合（装着部から離れた部位でも軟部組織の浮腫がある場合も含む）。

【形状・構造及び原理等】



【使用目的又は効果】

四肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減または予防する等、静脈還流を促進する。

【使用方法等】

対象部位に装着して下さい。

【使用上の注意】

- 1) 本製品は医師の処方により使用すること。使用にあたっては取扱説明書に従うこと。
- 2) 本製品は複数での共用はせず、一個人の方の使用に限定すること。
- 3) 誤使用をした場合では、保証は適応外となる。
- 4) 本製品を改造した場合、製品機能の低下を引き起こすため、改造しないこと。また、改造した場合、保証は適応外となる。
- 5) 万一、症状の悪化などの異常に気付いた場合は、直ちに医師へ相談すること。
- 6) 本製品と他の製品を併用する場合、医師へ相談すること。
- 7) 本製品は装着者の活動中に効果を発揮するため、就寝など長期間使用しない場合は取り外すこと。
- 8) 軟膏、ローション、グリースや酸を含む液体が製品に付着しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

- (1) 洗濯の際は中性洗剤を使用して30度以下のお湯または水で行ってください。
- (2) 洗濯機を使用する際は洗濯ネットに入れて洗濯してください。
- (3) ドライヤーや乾燥機は使用せず、陰干ししてください。
- (4) ドライクリーニングは行わないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

パシフィックサブライ株式会社 TEL:072-875-8008

製造業者

Bauerfeind AG