

2008年10月27日作成（新様式第1版）

歯科材料 9 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用研磨器材 コード 70907000

## アルゲルブルー

### 【形状・構造及び原理等】

形状：(容器)

紙箱

H60 W125 T35 (450 g)

成分：材質

油脂類

ステアリン酸 植物油脂 ペトラタム

植物樹脂

砥粒類

酸化アルミニウム 1ミクロン

顔料

青色染料

カラー（研磨材）

青色

### 【使用目的又は効果】

本研磨剤は、レジン、ポーセレンからニッケル（コバルトクロム合金）にいたるまで、すべてのつやだし研磨が可能。

局部床義歯、硬質レジン冠、ポーセレン冠など金属とレジン等を同時に研磨しても、黒ずんだり、焼きついたりしない。

ひとつのパフで両方同時に研磨つやだし可能。

### 【使用方法】

- (1) 研磨手順は従来の方法に従ってください。
- (2) レジン、金属、陶材に限らず、最後のパフ仕上げの段階で、この研磨材を使用してください。
- (2) 備考  
フェルトホイール等を使用すると一段とツヤが出ます。

### 【使用上の注意】

- (1) 研磨作業の際には粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- (2) 研磨作業を行う最には、目の損傷を防ぐために保護メガネを必ず使用すること。
- (3) 本製品は、説明書に記載の用途以外には使用しないこと。

### 【保管方法及び使用期間】

#### 【貯蔵・保管方法】

- ・ 直射日光のあたる所、ストーブの近く等高温になる場所では、保管しないこと。
- ・ 冷蔵庫等低温の場所に保管しないこと。  
(本品は温度によって、粘度が変化いたします。)

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 有限会社 バイタル  
住所： 〒177-0045  
東京都練馬区石神井台 2-5-18  
製造業者： 有限会社 バイタル  
電話番号： 03-3904-7975  
FAX番号： 03-3904-7511  
E-mail： vital-1@jcom.home.ne.jp