

2010 年 1 月 28 日作成（新様式第 1 版）

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 コード 70907000

デカバフ B （レーズ用）

【形状・構造及び原理等】

形状：

円形のパフ状

成分：材質

木綿布に酸化アルミニウムの微粉末を、含侵
させた布

寸法

直径 12cm

厚さ 約 10mm

カラー

青

【使用目的又は効果】

本パフは、研磨材が含侵されているので、レジン、
金属、陶材に限らずすべての研磨品を、研磨材を着ける
ことなくそのまま研磨できます。

【使用方法等】

(1) レーズへのセット

通方にしたがって大型電機レーズの竹の子へセット
して下さい。

この場合使用する器械メーカーの取扱説明書に従って
確実にセットして下さい。

(2) 備考

金属系、樹脂系双方に使用できますが、パフはそれ
ぞれに使い分けて下さい。併用されますと樹脂系が
黒ずむ時があります。

研磨力が劣化してきた場合、アルミナ研磨材を少量
パフに着けて研磨して下さい。

【使用上の注意】

- (1) 本品は、大型電気レーズにて使用して下さい。
小型レーズでは使用しないで下さい。
- (2) 本品の取り付けには、十分に留意し確実に竹の子等
に取り付けること。
- (3) 研磨作業の際には粉塵による人体への影響を避けるため、
局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用
し、粉塵を吸入しないこと。
- (4) 研磨作業を行う最には、目の損傷を防ぐために保護メガネ
を必ず使用すること。
- (5) 使用回転数は低速を厳守すること。
- (6) 使用前には必ず予備回転でテストし、回転ブレが無いこと
を確認する。
- (7) 無理な角度、過度の圧力等、危険な使用は避けること。
- (8) 本製品は、説明書に記載の用途以外には使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 有限会社 バイタル
住所： 〒177-0045
東京都練馬区石神井台 2-5-18
製造業者： 有限会社 バイタル
電話番号： 03-3904-7975
FAX番号： 03-3904-7511
E-mail： vital-1@jcom.home.ne.jp