

医療用品 04 整形用品  
一般医療機器 歯科用咬合スプリント コード 36311000

## コーピング

### 再使用禁止

---

#### 【形状・構造及び原理等】

1. 形状 : 127mm×127mm±1 の板  
厚さ : 0.5mm  
0.75mm  
1.0mm  
カラー : 乳白色
2. 成分 : ポリプロピレン

#### 【使用目的又は効果】

- 1) 使用目的・用途  
転位歯又は動揺歯の位置の保持、クレンジングや歯ざしりとその後遺症の治療、及び筋肉又は顎関節の疼痛、顎関節症に対する暫時的な除痛に使用。  
ただし、使用期間が 30 日を超えないものに限る。
- 2) 使用する器械の種類  
加熱吸引成型器（バキュームアダプター）

#### 【使用方法等】

- 1) 加熱吸引成型器のジスクホルダーにコーピングをセットして、ヒータで過熱する。
- 2) 加熱吸引成型器の吸引口に石膏模型をセットする。
- 3) コーピングが軟化されて垂れ下がってくる。  
軟化の目安 ジスクの過熱軟化により生じたしわがなくなり、平になった状態。
- 4) ジスクホルダーを持ってコーピングを下に下げて石膏模型に圧接し、吸引モーターを回転させる。  
①（吸引時間は、約 30 秒位）
- 5) 吸引終了後約 1 分位たったなら、ジスクホルダーからコーピングを外し、石膏模型と共に冷水に入れて硬化させる。
- 6) コーピングから石膏模型を外し、コーピングの制作工程に入っている。

#### 【使用上の注意】

- 1) コーピングは吸引成形器にて製作中、高温になるので火傷等にご注意すること。
- 2) コーピングの薄い板は、角等で指を切る恐れがあるため、注意すること。
- 3) 使用する加熱吸引整形器の添付文書、あるいは使用説明書を熟読したあと、正しく器具に装着すること
- 4) 使用する前に当材料に変形、ゆがみ、かび等の異常がないことを確認してから使用すること。
- 5) 歯科用以外の用途には使用しないこと。
- 6) 本材の使用により発疹などの過敏症状が現れた場合は使用を中止し、医師の診断を受けること。

#### 【保管方法及び有効期間】

- ・ 本材は、高温多湿の場所にて保管しないこと。
- ・ 本材は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する事。
- ・ 直射日光の当たる場所は避けること。
- ・ 児童の手の届かない場所に保管すること。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者： 有限会社 バイタル  
住所： 〒177-0045  
東京都練馬区石神井台 2-5-18  
製造業者： 有限会社 バイタル  
電話番号： 03-3904-7975  
FAX 番号： 03-3904-7511  
E-mail： vital-1@jcom.home.ne.jp