

機械器具(49) 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
一般医療機器 歯科用マンドレル 35170000


ペーパーディスク用マンドレル

【禁忌・禁止】

- ・本書に記載の用途以外には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

構造

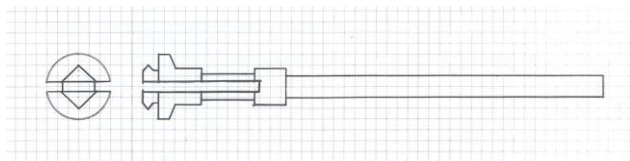

素材 ステンレス鋼、鉄

軸部 ストレートハンドピース用軸

軸の規格 JIS T 5504-1:2014 タイプ 2

【使用目的又は効果】

義歯床粘膜面に裏装されたシリコーン系軟質裏装材の削合に用いるペーパーディスクを保持するためのシャフトに用いる。

【操作方法又は使用方法等】

研削に用いるペーパーディスクを保持し歯科技工用ハンドピース等に装着し使用する。

【使用上の注意】

- 1) 本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
- 2) 使用前、使用後に点検を行い、汚染がある場合は除去すること。
- 3) 損傷、ひび割れ、変形（軸部のキズ、曲がり等）のあるものは、使用しないこと。
- 4) 本品を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- 5) 本品を使用する際には、目の損傷を防ぐために、保護メガネなどを使用すること。
- 6) 取り付けるペーパーディスクの指定回転数を超えて使用しないこと。
- 7) 使用する機械製造者の指定に従って軸を振れ、ガタ、緩みの無いよう軸長の2/3以上確実にチャッキングさせること。
- 8) 予め人体に影響のない場所で回転させて、安全を確認すること。
- 9) 二次加工の禁止 破損等の原因になるので曲げ、切削、打刻等（改造）の禁止。
- 10) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 湿気、腐食性薬剤及びその蒸気の曝露を避ける。
2. 外圧（物理的負荷）及び汚染を避ける。
3. 歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後の点検：使用前・使用後に破損、変形、ひび、傷、変色、腐食、曲がり等の異常がないか確認すること。
これらがある場合は、使用を中止すること。

【包装】

1 本入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

1. 製造販売元 株式会社 バイテック・グローバル・ジャパン
住所 〒104-0052

東京都中央区月島 2-14-12 月島セントラルビル

TEL 03-6824-9190

FAX 03-5546-2224

E-mail info@bitecglobal.com