

歯科材料(09) 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研削器材 70908000


ペーパーディスク

【禁忌・禁止】

・本書に記載の用途以外には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状：

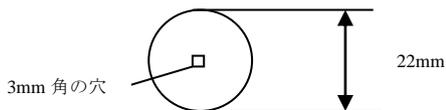

原材料：炭化けい素、アルミナ

【使用目的又は効果】

義歯床粘膜面に裏装されたシリコン系軟質裏装材の削合及び粗造な表面を平滑にするために使用する。

【操作方法又は使用方法等】*

通法に従い、歯科技工用ハンドピースに装着し、レジンと軟質リライン材の移行部（床縁と小帯）の調整時に使用する（レジンと軟質リライン材を同時に調整できる）。必ず低速の（5,000-8,000回転/分）回転数、かつソフトタッチで使用する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 本品は、ハンドピース製造メーカーの指示に従って、シャックを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認してから使用すること。
- 2) 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
- 3) 予め人体に影響のない場所で回転させて、安全を確認すること。
- 4) 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

【使用上の注意】*

1. 使用注意

- 1) 本品を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- 2) 本品を使用する際には、目の損傷を防ぐために、保護めがねなどを使用すること。
- 3) 本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
- 4) 二次加工の禁止 破損等の原因になるので曲げ、切削、打刻等（改造）の禁止。
- 5) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- *6) オートクレーブ等の加圧滅菌機器の使用は避けること。
- *7) 塩素系などの金属腐食性の高い薬液での消毒は行わないこと。

2. 重要な基本的注意

本品は、目に入らないように注意すること。万一目に入ったときは、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 外圧（物理的負荷）及び汚染を避ける。
2. 水分が付着したまま保管しない。
3. 歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】**

使用前・使用後の点検：使用前・使用後に破損、変形、ひび、傷、変色、曲がり等の異常がないか確認すること。

これらがある場合は、使用を中止すること。

**見本品と色味が異なる場合がありますが、品質に問題はありません。

【包装】

ペーパーディスク：20枚

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

1. 製造販売元 株式会社 バイテック・グローバル・ジャパン
住所 〒104-0052
東京都中央区月島2-14-12 月島セントラルビル
TEL 03-6824-9190
FAX 03-5546-2224
E-mail info@bitecglobal.com