


ナイロンホイール

【禁忌・禁止】

- ・本書に記載の用途以外には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

構造

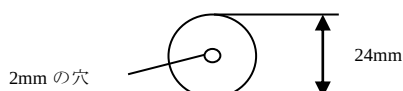

名称	材質
ブラムナイロンホイール	炭化けい素、不織布
オレンジナイロンホイール	ホワイトアランダム、不織布

【使用目的又は効果】

義歯床粘膜面に裏装されたシリコン系軟質裏装材の粗造な表面を平滑にするために使用する。

【操作方法又は使用方法等】*

ブラムナイロンホイール：

ナイロンホイール軸受に装着後、通法に従い、歯科技工用ハンドピースに装着し、荒れている軟質リライン材表面、ささくれ、さらにレジンと軟質リライン材の移行部の仕上げに使用し、面を滑らかにする。接着面と平行方向、または、軟質リライン材からレジンに回転する方向で使用する。必ず低速の(5,000-8,000 回転/分)回転数、かつソフトタッチで使用する。

オレンジナイロンホイール：

ナイロンホイール軸受に装着後、通法に従い、歯科技工用ハンドピースに装着し、軟質リライン材の最終仕上げに使用する。ブラムナイロンホイールよりも目が細かいため、オレンジナイロンホイールを使用することで軟質リライン材表面が滑らかになる。接着面と平行方向、または、軟質リライン材からレジンに回転する方向で使用する。必ず低速の(5,000-8,000 回転/分)回転数、かつソフトタッチで使用する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 本品は、ハンドピース製造メーカーの指示に従って、シャックを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認してから使用すること。
- 2) 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
- 3) 予め人体に影響のない場所で回転させて、安全を確認すること。
- 4) 無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

【使用上の注意】*

1. 使用注意

- 1) 使用するシャックに損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは、使用しないこと。
- 2) 本品を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- 3) 本品を使用する際には、目の損傷を防ぐために、保護めがねなどを使用すること。
- 4) 本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
- 5) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

*6) オートクレープ等の加圧滅菌機器の使用は避けること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】*

1. 汚染を避ける。
 2. 歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。
- *3. 湿気、腐食性薬剤及びその蒸気の曝露を避ける。
*4. 外圧（物理的負荷）及び汚染を避ける。

【保守・点検に係る事項】

使用前・使用後の点検：使用前・使用後に破損、変形、等の異常がないか確認すること。
これらがある場合は、使用を中止すること。

【包装】

ナイロンホイール：6 個

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

1. 製造販売元 株式会社 バイテック・グローバル・ジャパン
住所 〒104-0052
東京都中央区月島 2-14-12 月島セントラルビル
TEL 03-6824-9190
FAX 03-5546-2224
E-mail info@bitecglobal.com