

医療器具 11 放射線障害防護用具
一般医療機器 放射線防護用顔面防護具
コード 38363000


アイピーグラス

【禁忌・禁止】

〔使用方法〕

鉛アクリルレンズに破損が認められるものは使用しないこと。（正常なX線遮へい性能が保たれない可能性がある。）

【形状・構造及び原理】

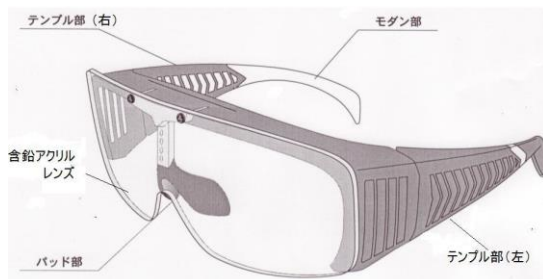

本品は鉛鉛アクリルにより診断や治療のための医科／歯科治療に伴う一次放射線や散乱放射線による不必要な被曝から医療関係者や他の人員の顔面や眼を保護する共に液状の放射性物質から保護する。

個人用メガネの上から着用でき、液状の放射性物質から保護する役割も果たす、バイザー又はマスクと称される場合もある。

【使用目的・効能又は効果】

診断や治療のため医科／歯科処置に伴う一次放射線や散乱線による被曝から医療関係者や他の人員の顔面を保護するために使用する透明又は不透明な個人防護装置である。

【品目仕様等】

受け入れ時及び出荷時に下記の検査を実施し品質・安全性及び有効性を確保する。

受け入れ時 1) 目視検査、キズ・曲がり・汚れ等の検査 2) 寸法検査

出荷時 1) 外見検査 2) 表示検査

以上検査を全数実施する。

【操作方法及び使用方法】

破損がないことを確認し両手を添えて耳と鼻にしっかり固定されるように装着する。

【使用上の注意】

- 1) 使用する時には適切に装着されているか確認すること。
- 2) 落下や衝突は破損の原因になるので取扱に十分注意すること。
- 3) テンプルを無理に広げないこと
- 4) 分解修理をしないこと。
- 5) 破損のある場合は使用しないこと。

【貯蔵・保管方法】

高温・多湿な場所を避け、キズが入らないように保管すること。

【取扱上の注意】

- 1) 含鉛アクリルを水拭きしないこと。（酸化の原因となる。）
- 2) ガス滅菌、高圧蒸気滅菌等は本体が熱で変形、変質する可能性があるため使用しないこと。
- 3) 破棄する場合は、必ず地方自治体の条例・規制に従い、許可を得た産業廃棄物処理業者に破棄を依頼すること。

【保守・点検】

使用前に破損がないことを確認すること。

【包装】 一個毎

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売元 株式会社パドル

住所 〒 810-0029

福岡県福岡市早良区高取1-27-33