

ミラーシャイン

保管・管理すること。

*【形状・構造及び原理等】

外観写真 (200g)



形状

本品は、下記成分により構成される固体成型体である。

成分	色
酸化アルミニウム、脂肪酸	グリーン

【使用目的又は効果】

本品は、補綴物の研磨に用いる器材として用いる。

【使用方法等】

バフ等に本品を塗布し、回転させながら被研磨物に押し当てて研磨を行う。

*使用方法に関連する使用上の注意

1. 本品を使用する前に外観、形状に異状がないか確認すること。
2. 本品を使用して研磨する際は、無理な角度や過度の加圧での使用は避けること。
3. 点火源から遠ざけて使用すること。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 本品を使用する際は、目の損傷を防ぐため保護眼鏡を着用すること。万一目に入った場合には、直ちに大量の水で洗顔し、医師の診断を受けること。
2. 本品が含有する酸化アルミニウムを長期にわたって吸入すると肺が損傷される可能性があるため、局所吸塵機や公的機関が認定した防塵マスクを使用して粉塵を吸い込まないように注意すること。
3. 本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状が現れた場合は、使用を中止し、医師の診断を受けること。
4. 本品を取り扱う場所の近くに手洗い、洗顔設備等を設け、その位置を明確に表示すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

1. 本品は高温多湿の場所を避けて保管すること。また、開封後は密閉して保管すること。
2. 本品はアルカリ性物質との共存を避けること。
3. 本品は歯科の従事者以外が触れないように適切に

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社ユニバル
住所 〒178-0063
東京都練馬区東大泉 3-31-11
電話番号 03-3923-4186