


歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材（70907000）


バル ロビンソンブラシ

*【形状・構造及び原理等】

外観写真

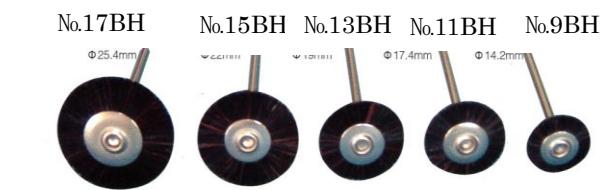

ミディアム(BH)

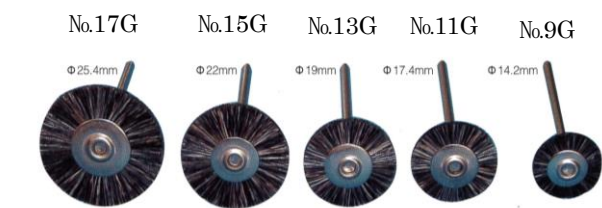

ソフトタイプ(G)

[形状・構造]

- ①ブラシ部：平型円盤状
- ②軸部：軸径 2.35mm 軸長 40mm

[仕様]

種類	直径 mm	材質	種類	直径 mm	材質
No.17BH	25.4	馬毛	No.17G	25.4	羊毛
No.15BH	22	馬毛	No.15G	22	羊毛
No.13BH	19	馬毛	No.13G	19	羊毛
No.11BH	17.4	馬毛	No.11G	17.4	羊毛
No.9BH	14.2	馬毛	No.9G	14.2	羊毛

[原理]

本品をハンドピース又は技工用回転機に装着して回転を与え、研磨材を塗布しながら補綴物を研磨する。

【使用目的又は効果】

本品は、補綴物の研磨に用いる器材として用いる。

【使用方法等】

- 1) 本品の軸部をハンドピース等に確実に取付け固定します。
- 2) ブラシに研磨材を塗布して回転を与え、断続的に被研磨物に押し付けて研磨を行う。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) ハンドピース等のに装着した後、適切に装着されていることを確認すること。
- 2) 本品の使用前に予備回転を行い、振れがないか確認すること。
- 3) 本品を使用する際、無理な角度、過度の加圧は避けること。
- 4) 本品の使用前、使用中に不具合が生じた場合には、使用を中止すること。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 1) 本品を使用する際には、目の損傷を防ぐため、保護眼鏡を着用すること。万一粉塵が目に入った場合は、直ちに大量の水で洗顔し、医師の診断を受けること。
- 2) 本品を使用して研磨する際には、局所吸塵装置や公的機関が認定した防塵マスクを使用して粉塵を吸い込まないよう注意すること。
- 3) 本品の取り扱い場所の近くに手洗い、洗顔設備等を設け、その位置を明確に表示すること。

【保管および有効期間等】

[保管方法]

- 1) 本品は高温多湿の場所を避けて保管すること。
- 2) 本品は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社ユニバル

住所 〒178-0063
東京都練馬区東大泉 3-31-11

電話番号 03-3923-4186