


歯科材料 09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用研磨器材 (70907000)

バル レーズブラシ

\*【形状・構造及び原理等】

外観写真

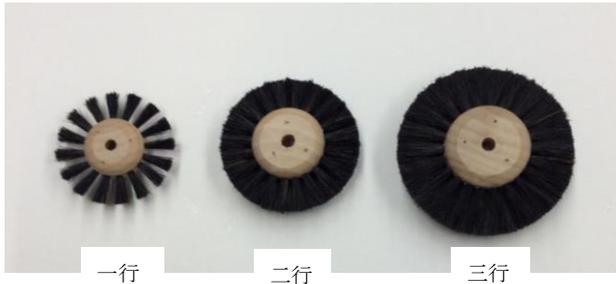

【仕様】

型番	木部mm	外径mm	材質
一行	25	51	豚毛
二行	30	58	豚毛
三行	35	70	豚毛

【原理】

レーズ装着部中央に装着孔の開いた円盤状の固定部、及びその固定部周囲に配列したブラシ部から成る研磨器材である。

【使用目的又は効果】

本品は、補綴物等の研磨に用いる器材として用いる。

【使用方法等】

- 1) 本品を歯科用電気レーズに確実に取り付け固定します。
- 2) 本品に歯科用電気レーズにより回転を与え、研磨材を軽く押し当て塗布した後、被研磨物に押し当てて研磨を行います

\*【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) 本品を歯科用電気レーズに装着した後、適切に装着されていることを確認すること。
- 2) 本品の使用前に予備回転を行い、振れがないか確認すること。
- 3) 本品を使用して研磨する際は、無理な角度や過度の加圧での使用は避けること。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- 1) 本品を使用する際は目の損傷を防ぐため保護眼鏡を着用すること。  
万一目に入った場合は、直ちに大量の水で洗顔し、医師の診断を受けること。
- 2) 本品を使用して研磨する際には、局所吸塵装置や公的機関が認定した防塵マスクを使用して粉塵を吸い込まないように注意すること。
- 3) 本品に劣化や異常が見られた場合には、使用を中止すること。
- 4) 本品の取扱う場所の近くに手洗い、洗顔設備等を設け、その位置を明確に表示すること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 1) 本品は高温多湿の場所を避けて保管すること。
- 2) 本品は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社ユニバル  
住所 〒178-0063  
東京都練馬区東大泉 3-31-11  
電話番号 TEL 03-3923-4186