

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 (70907000)

Perfectpolisher (パーフェクトポリシャ)

**【形状・構造及び原理等】

〔形状・構造〕

本品は、下記成分により構成される淡乳白色の粉末である。

成 分	包 装
珪藻土：>99%	460 g 入り ポリ袋
内クリストバライト：≤70%	
防カビ剤：<1%	

〔原理〕

研磨用ブラシに塗布して使用する研磨器材である。

【使用目的又は効果】

本品は、補綴物等の研磨に用いる器材として用いる。

【使用方法等】

本品 100 g に対して水 230～240m l を加え、よく混練りしてペースト状とした後、ブラシ等に適量を塗布しながら研磨作業を行う。

*〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1) 本品の使用後は、湿気を防ぐため必ず密封すること。
- 2) 本品の取り扱い後は、手を良く洗うこと。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

- 1) 本品を使用する際は目の損傷を防ぐため保護眼鏡を着用すること。
万一目に入った場合は、直ちに大量の水で洗顔し、医師の診断を受けること。
- 2) 本品を長期にわたって吸入すると肺 が損傷される可能性があるため、局所吸塵装置や公的機関が認定 した防塵マスクを使用して粉塵を吸い込まないよう注意すること。
- 3) 本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状が現れた場合は、使用を中止し、医師の診断を受けること。
- 4) 本品の取扱う場所の近くに手洗い、洗顔設備等を設け、その位置を 明確に表示すること。

【保管および有効期間等】

〔保管方法〕

- 1) 本品は高温多湿の場所を避けて保管すること。また開封後は密閉して保管すること。
- 2) 本品は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社ユニバル
住所 〒178-0063
東京都練馬区東大泉 3-31-11
電話番号 TEL 03-3923-4186