

## ビックポイント (Bigpoint)

### 【形状・構造及び原理等】

電話番号

東京都練馬区東大泉 3-31-11  
03-3923-4186

#### 組成

研磨部：シリコンカーバイド、アルミナ、ゴム、レジ  
ン等を主成分とする混合物  
軸 部：ステンレス鋼、真鍮

#### 形状

研磨部形状：砲弾型  
寸 法：研磨部：直径 10mm 長さ 24mm  
軸 部：軸径 2.35mm 長さ 30mm

#### 仕様

| 品番  | メッシュ | 色調   |
|-----|------|------|
| 粗め  | #24  | ブラウン |
| 細かめ | #50  | オレンジ |

### 【使用目的又は効果】

ゴム基材で結合された研磨成分から成る歯科用研磨材で、  
歯科技工物の面研磨に使用する。

### 【使用方法等】

- 1) 本品をハンドピース用金具に確実に取り付け固定  
します。
- 2) ハンドピースにより回転を与え、研磨します。
- 3) 補綴物等を研磨します。

#### \*使用方法に関連する使用上の注意

- 1) 本品を歯科用ハンドピース用金具に確実に取り付  
け、回転中に目視で容易 に判別出来る偏心を認  
めてはならない。
- 2) 本品が回転中に離脱飛散ないようにハンドピー  
スへの固定は確実にすること。。

#### \*【使用上の注意】

##### 重要な基本的注意

- 1) 本品を使用する際は、眼の損傷を防ぐため保護メ  
ガネを着用すること。  
万一飛散物が目に入った場合は、直ちに大量の水  
で洗顔し、医師の診断を受けること。
- 2) 本品を使用して研磨する際には、局所吸塵装置や  
公的機関が認定した防塵マスクを使用して粉塵を  
吸い込まないよう注意すること。
- 3) 本品に劣化や異常が見られた場合には、使用を中  
止すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 保管方法

- 1) 本材は歯科の従事者以外が触れないように適切に  
保管・管理すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社ユニバル  
住所 〒178-0063