

入れ歯キュッキュ

*【禁忌・禁止】

粉じんを吸入するとアレルギー、喘息又は呼吸困難を起す恐れがあるので、酸化アルミニウムに過敏な患者には適用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品は、下記成分により構成される綿布である。使用後の義歯表面の再研磨に使用する。

成 分	色
綿布、酸化アルミニウム、ロジン、鉱油	ピンク

【使用目的又は効果】

義歯の永年使用により義歯表面に傷がつき、ざらつきを生じた際、本品で表面を研磨し平滑に上げることができる。再研磨により義歯表面の平滑さが得れる。

【使用方法等】

使用方法

- 1) 義歯の水気を良く拭き取って磨いてください。
- 2) キズやザラツキなどが気になる部分を丁寧に磨いてください。
- 3) 義歯をみがき終わったら、良く水洗いをして装着してください。

使用方法に関連する使用上の注意

- 1) お肌の弱い方は、薄い手袋をはめて使用すること。
- 2) 本品を水洗いすると、有効成分が溶け出すので水洗いはしないこと。
- 3) メガネ、カメラなどのレンズには使用しないこと。
- 4) 取り扱い後は、義歯と手をよく洗うこと。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 1) 本品で磨く際は、粉じんを吸い込まないように注意すること。
- 2) 屋外又は換気の良い区域で使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

本品は、高温・多湿を避けて室内に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社ユニバル
住所 〒178-0063
東京都練馬区東大泉 3-31-11
電話番号 03-3923-4186