

PF (パーフェクト) スプリント

【禁忌・禁止】

本品は、患者の使用期間が 30 日以内となっているため、30 日を超えて使用させないこと。

本品に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

材質：ポリエチレンテレフタレート

形状：四角型、丸型

寸法：下記表のとおり

1) 四角型

サイズ	寸法	
	一辺 (mm)	厚さ (mm)
0.5mm	127±2.0	0.5±0.05
0.8mm		0.8±0.1
1.0mm		1.0±0.1
1.5mm		1.5±0.15
2.0mm		2.0±0.15

2) 丸型

サイズ	寸法	
	直径 (mm)	厚さ (mm)
0.5mm	125±2.0	0.5±0.05
0.8mm		0.8±0.1
1.0mm		1.0±0.1

【使用目的又は効果】

歯科用咬合スプリントを作製するために用いる。ただし、使用期間が 30 日を超えないものに限る。

【使用方法等】

- 1) 患者の印象模型を歯科技工用成形器に設置し、本品をホルダーにセットする。
- 2) 加熱部のスイッチを入れ、本品を固定したホルダーを加熱部まで引き上げる。
- 3) 本品が軟化したらホルダーを下げ、石膏模型に密着させる。
- 4) 吸引スイッチを入れて吸引した後、冷却する。
- 5) 完全に冷却し、本品が硬化したら模型から取り外し、辺縁部、バリ等を研磨する。

使用方法に関連する使用上の注意

- 1) 本品は、傷、汚れを防ぐため、両面に保護フィルムが付いているので、使用前に剥がしてから使用すること。
- 2) 成型時の加熱部及び加熱時の本品は、高温になるため、誤って触れないように注意すること。
- 3) 辺縁部やバリ等で手指等を切らないように取扱いに注意すること。
- 4) 本品使用前、使用中に不具合が生じた場合は使用を中止すること。
- 5) 使用前、使用後は破損、ヒビ、大きな腐食等がないか確認すること。また、これらがある場合は、使用を中止すること。
- 6) 吸湿を防ぐため水による洗浄は行わないこと。汚れがある場合は、乾いた布で拭き取ること。

* 【使用上の注意】

使用注意

本品は、患者の使用期間が 30 日を超えて使用しないこと。

重要な基本的注意

- 1) 本品の使用により、発疹、皮膚炎等の過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- 2) 本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症のある術者は、手袋等の保護具を着用して直接本材に触れないようにすること。
- 3) 本品の使用により発疹、湿疹、発赤、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた術者は、使用を中止し、医師の診察を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- 1) 開封前は冷暗所に保管すること。開封後は直射日光を避け、室温で保管すること。
- 2) 本品を火気の近くで使用したり、火気の近くに置かないこと。
- 3) 使用後は包材を密封して保管すること。吸湿により成型時に気泡が発生することがあります。
- 4) 歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社ユニバル
住所 〒178-0063 東京都練馬区東大泉 3-31-11
電話番号 03-3923-4186