

歯科材料 09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000

## Perfectpolisher (パーフェクトポリシャ) ・A

### 【形状・構造及び原理等】

#### 形状・構造

本品は、下記成分により構成される淡黄色の粉末である。

成 分	包 装
珪藻土>99% 内クリストパライト $\leq$ 70% 防カビ剤：<1%	460 g 入り ポリ袋

#### 原理

研磨用ブラシに塗布して使用する研磨器材である。

### 【使用目的又は効果】

本品は、補綴物等の研磨に用いる器材として用いる。

### 【使用方法等】

本品 100 g に対して水 230~240m l を加え、よく混練りしてペースト状とした後、ブラシ等に適量を塗布しながら研磨作業を行う。

#### 使用方法に関連する使用上の注意

- 1) 本品の使用後は、湿気を防ぐため必ず密封すること。
- 2) 本品の取り扱い後は、手を良く洗うこと。

### 【使用上の注意】

#### 重要な基本的注意

- 1) 本品を使用する際は目の損傷を防ぐため保護眼鏡を着用すること。  
万一目に入った場合は、直ちに大量の水で洗顔し、医師の診断を受けること。
- 2) 本品を長期にわたって吸入すると肺が損傷される可能性があるため、局所吸塵装置や公的機関が認定した防塵マスクを使用して粉塵を吸い込まないように注意すること。
- 3) 本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状が現れた場合は、使用を中止し、医師の診断を受けること。
- 4) 本品の取扱う場所の近くに手洗い、洗顔設備等を設け、その位置を明確に表示すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 保管方法

- 1) 本品は高温多湿の場所を避けて保管すること。また開封後は密閉して保管すること。
- 2) 本品は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社ユニバル  
住所 〒178-0063  
東京都練馬区東大泉 3-31-11  
電話番号 03-3923-4186