

機械器具(50) 開創又は開孔用器具  
一般医療機器 挿管用喉頭鏡 70948009

## UE スコープ ビデオ喉頭鏡 ディスポーザブルブレード

再使用禁止

### 【警告】

本品は、当社指定のビデオ喉頭鏡専用のブレードである。施術前に必ずビデオ喉頭鏡のハンドルに正しく装着されていることを確認すること。  
[使用中の脱落や破損による傷害のおそれがあるため。]

### 【禁忌・禁止】


・本品は、再使用禁止である。  
・キズ、汚れ、破損など、異常が認められる場合には使用しないこと。  
・「UEスコープ ビデオ喉頭鏡」以外の喉頭鏡と併用しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 概要

本品は、ビデオ喉頭鏡のハンドルに装着し、救急医療等で気道確保のために気管への気管内チューブの挿入、配置を支援する単回用のブレードである。粘膜や血液・体液等がビデオ喉頭鏡に直接接触することを防止、保護し、単品もしくは複数、組み合わせて製造販売される。サイズのバリエーションがある。

#### 2. 形状・寸法

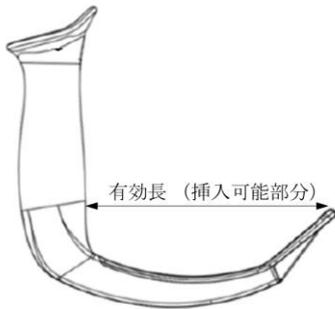

本品は、以下の構成があり、各型番のサイズは下記のとおり。

型番	挿入可能部分の長さ (mm)	装着可能なハンドル
UED-A0	55	UED-A0 Handle
UED-A1	70	
UED-MA1	80	
UED-A2	84	UED-A3 Handle
UED-A3	108	
UED-A4	123	

#### 3. 原材料

ポリカーボネート

### 【使用目的又は効果】

本品は、麻酔又は救急医療等で気道確保のために気管(人の気道)への気管内チューブの挿入、配置を支援したり、異物を除去したりするために用いるビデオ喉頭鏡に装着するブレードである。

### 【使用方法等】

※詳細な操作方法については、併用するビデオ喉頭鏡の添付文書、取扱説明書を参照のこと。

1. 本品を包装から取り出し、キズ、汚れ、破損がないかどうか確認する。
2. 本品をハンドルの先端部(挿入管)に被せるようにかたちに沿って、ブレードの上部がハンドルにしっかりとハマり込むように装着する。装着後、確実に接続されているかどうかを確認する。
3. 使用後は、本品をビデオ喉頭鏡から取外し、破棄する。

組合せて使用する医療機器(別売り)

販売名
UE スコープ ビデオ喉頭鏡

[使用方法に関連する使用上の注意]

1. 患者の歯を支点として操作しないこと。[歯を損傷することがあるため。]
2. 挿入時に過度な力を加えないこと。
3. 患者に適したサイズのブレードを選択し、使用すること。

### 【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

1. 使用前に、本品の外表面に、患者に損傷を与える可能性のある粗い表面、鋭いエッジ又は突起がないことを確認すること。
2. 未使用でも一旦開封した製品は廃棄すること。
3. 適切な気管挿管の方法を適用すること。

[使用後の注意]

1. 本品を廃棄する際は、医療廃棄物として処理すること。

### 【保管方法】

風通しが良く、腐食性ガスがない、乾燥した日光の当たらない室内にて保管すること。

### 【有効期間】

生産ロット番号に表示されている日付より3年とする。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社 MEDIK

東京都中央区日本橋箱崎町 25 番 7 号 8F

TEL: 03-6264-9961 FAX: 03-6264-9962

外国製造業者: Zhejiang UE Medical Corp. (ジェージャン UE メディカル)

外国製造所国: 中華人民共和国