

機械器具 21 内臓機能検査用器具

一般医療機器 心電計ケーブル及びリード 35562010

# マクトロードECGワイドマウスクリップ

**【禁忌・禁止】**

〈併用医療機器〉「相互作用の項参照」

- MRI 検査を行う際は本品を検査室に持ち込まないこと。  
[MR 装置への吸着や、火傷等のおそれがあるため。]

**【形状・構造及び原理等】**

- 形状



カタログ番号	品名
2066867-010	ECG ワイドマウスクリップ マクトロード 10

- 作動原理


本品は心電図リード線のバナナプラグに接続し、ディスプレイ ECG 電極から導出した心電図信号を装置に伝達する ECG アダプタである。本品は標準的なφ3~4mm プラグに対応している。

**【使用目的又は効果】**


患者の心電図信号を心電計 (ECG) に伝達する装置をいう。本品は、あるパターンに従って電極を用いて胸部に取り付ける。

**【使用方法等】**

- 電極を貼る部分を剪毛後、皮膚を清拭し乾燥させる。
- リード線のバナナプラグを、本品の接続部に装着する。

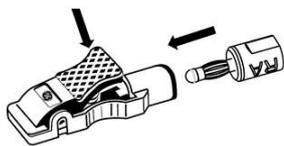

- 患者の胸部の正しい位置に電極を貼り、バナナプラグの数字及びアルファベットに注意して、該当する電極を接続する。本品はディスプレイ ECG 電極〈ボタン電極とタブ電極の両方〉に接続可能である。

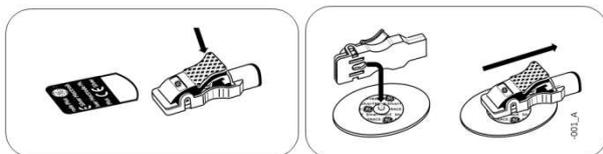

**【使用上の注意】**

〈重要な基本的注意〉

- リード線は定められた場所に装着すること。(使用方法の 1~3 を参照のこと)
- 抜き差しを行う場合は、リード線を引っ張らずにコネクタ部を持って行うこと。[断線や接触不良の原因となるため]
- 液体に触れさせないこと。[液体に触れると、クリップが錆びるなど損傷の可能性があるため]
- 金属ばねが腐食したり、プラスチックのハウジングが劣化していることが明らかな場合は、使用を中止すること。

〈相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）〉

- 併用禁忌（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
核磁気共鳴画像診断装置 (MRI 装置)	検査室に本品を持ち込まないこと。MRI 検査を行うときは、本品を患者から取り外すこと。	誘導起電力により局所的な発熱で火傷のおそれがある。また、磁気により本品が吸着されるおそれがある。

**【保管方法及び有効期間等】**

〈耐用期間〉

本品は消耗品（修理不可能）である。異常があれば新品と交換すること。

**【保守・点検に係る事項】**

〈使用者による保守点検事項〉

- 保守点検の前にバナナプラグから取り外すこと。
- 洗浄液（10%の次亜塩素酸ナトリウム水溶液）で湿らせた布で拭くこと。
- 洗浄後、滅菌水又は蒸留水で湿らせた布で拭いた後、清潔な乾いた布、又はガーゼで拭いて完全に乾燥させること。
- 本品は液体に浸さないこと。オートクレーブ、放射能、蒸気で滅菌しないこと。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：

パイエアメディカル合同会社

TEL：0120-951-321（カスタマーサービス）