

機械器具 5 麻酔器並びに麻酔器用呼吸囊及びガス吸収かん
管理医療機器 再使用可能な麻酔用呼吸回路 37021000
（管理医療機器 麻酔回路セット 70567000）
（管理医療機器 単回使用麻酔用呼吸回路 37704000）

患者回路 （ディスプレイザブル）

再使用禁止

【警告】

1. 使用前に本品と接続するチューブ類を確実に接続し、リークが無いことを確かめること。
2. 他の機器と接合して使用する場合は閉塞がおこらないよう吸気・排気回路が確保されていることを十分に確認し使用すること。
3. サンプリングチューブを使用しないときはサンプリングポートのキャップを確実に閉めておくこと。
4. 本品の使用により死腔量が増えるため換気条件を再設定すること。

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状



患者回路 大人用

2. 本体寸法

管径：22mm、又は 15mm

カタログ番号	品 名
73385-HEL	ストレート T アダプタ 22/15mm-15mm
73386-HEL	エルボアダプタ 22/15mm-15mm
M1019542	エクスパンダブル回路 成人 180cm

【使用目的又は効果】

本品は閉鎖循環式麻酔器（半閉鎖循環式麻酔器、麻酔システム等を含む）の患者回路として用いる。

【使用方法等】

〈使用方法〉

1. 他の構成部品との接続をしっかりと行なうこと。リークがないことを確認して使用すること。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

1. 常に患者の状態の観察を行い、流量抵抗を確認すること。
2. 包装に破損がある場合は使用しないこと。
3. 使用前に本品と接続するすべての機器との接続を確実にし、接続箇所は両手で持ってねじって固定し、リークが無いことを確認すること。
4. 本品を使用中の患者の状態をよく観察し、合併症が発生した場合は適切な処置をとること。
5. 呼気ガスモニタやパルスオキシメータ等で常に観察し、患者の異常や異変を発見できるようにすること。
6. 本品を液に浸したり。水洗い、ガス滅菌。蒸気滅菌をしないこと。[有毒な残留ガスが発生し、患者に呼吸障害が発生する場合がある。]

**【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

保管条件はパッケージに記載。

〈有効期間〉

使用期限はパッケージに記載。

但し、これは推奨された環境で保管された場合で、保管状況により差異が生じることがある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

* エアライフジャパン合同会社

TEL：0120-951-321（カスタマーサービス）

外国製造業者：

** エアライフ フィンランド オーワイ（AirLife Finland Oy）

国名：フィンランド共和国