

機械器具 05 麻酔器並びに麻酔器用呼吸囊及びガス吸収かん
管理医療機器 単回使用麻酔用呼吸回路 37704000
(管理医療機器 麻酔回路セット 70567000)

ディスポーザブル患者回路

再使用禁止

【警告】

- 使用前に本製品と接続するチューブ類を確実に接続しリークがないことを確かめること。
- 他の機器と接続して使用する場合は閉塞が起こらないように呼気・排気回路が確保されていることを十分に確認し使用すること。

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 本品を液に浸す、水洗いを行う、ガス滅菌、蒸気滅菌をしないこと。[有毒なガスが生じたり呼気抵抗が危険なレベルにまで増加する可能性があるため]

【形状・構造及び原理等】

形状



M1019515

カタログ番号	品名
M1019515	エクスパンドブル回路 成人 300cm 3Lbag&CO2
M1019525	患者回路 成人 180cm ABS
M1019537	患者回路 成人 180cm (エルボ無)
M1019541	患者回路 成人 150cm (CO2 ポート無)
M1019549	患者回路 成人 150cm 3Lbag (CO2 ポート無)

【使用目的又は効果】

本品は、閉鎖循環式麻酔器（半閉鎖循環式麻酔器、麻酔システム等を含む）の患者回路として用いる。

【使用方法等】

- 他の構成部品との接続をしっかりと行いリークがないことを確認して使用する。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 開封前に包装に破損がある場合は使用しないこと。
- すべての接続箇所は両手で持ってねじって固定し、漏れがないことを確認すること。
- サンプリングチューブを使用しない時はサンプリングポートのキャップを確実に閉めておくこと。
- 本製品の使用により死腔量が増えるため換気条件を確認し必要な場合には再設定すること。

*【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

保管条件はパッケージに記載。

〈有効期間〉

使用期限はパッケージに記載。

但し、これは推奨された環境で保管された場合で、保管状況により差異が生じることがある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

エアライフジャパン合同会社

TEL：0120-951-321（カスタマーサービス）

外国製造業者：

** エアライフ フィンランド オーワイ（AirLife Finland Oy）

国名：フィンランド共和国