

機械器具 05 麻酔器並びに麻酔器用呼吸囊及びガス吸収かん
管理医療機器 単回使用麻酔器用呼吸回路 37704000
（管理医療機器 麻酔回路セット 70567000）

ディスポーザブル患者回路 （マニュアルバック）

再使用禁止

【警告】

- 他の機器と接続して使用する場合は閉塞が起こらないように呼気・排気回路が確保されていることを十分に確認し使用すること。

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 本品を液に浸したり、水洗いしたり、ガス滅菌、蒸気滅菌をしないこと。[有毒な残留ガスが生じ、呼気抵抗が危険なレベルにまで増加する可能性があるため]

【形状・構造及び原理等】

形状



- すべての接続箇所は両手で持ってねじって固定し漏れがないか確認すること。
- 本品の使用により死腔量が増えるため換気条件を確認し必要な場合には再設定すること。

*【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

保管条件はパッケージに記載。

〈有効期間〉

使用期限はパッケージに記載。

但し、これは推奨された環境で保管された場合で、保管状況により差異が生じることがある。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

エアライフジャパン合同会社

TEL：0120-951-321（カスタマーサービス）

外国製造業者：

** エアライフ フィンランド オーワイ（AirLife Finland Oy）

国名：フィンランド共和国

カタログ番号	品 名
M1036385	ディスポーザブル マニュアルバッグ 0.5L
M1036386	ディスポーザブル マニュアルバッグ 1L
M1036387	ディスポーザブル マニュアルバッグ 2L
M1036388	ディスポーザブル マニュアルバッグ 3L

【使用目的又は効果】

本品は閉鎖循環式麻酔器（半閉鎖循環式麻酔器、麻酔システム等を含む）の患者回路として用いる。

【使用方法等】

本品は麻酔器の呼吸囊取り付け部に接続して手動換気を行うため用いる。

〈使用方法〉

- 他の構成部品との接続をしっかりと行うこと。リークがないことを確認して使用する。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 開封前に包装に破損がある場合は使用しないこと。
- 使用前に本品と接続するチューブ類を確実に接続し、リーク試験を必ず行うこと。