

機械器具 6 呼吸補助器

管理医療機器 麻酔回路セット 70567000 （呼吸回路セット 70566000）

麻酔回路セット（VS） （ノンラテックス・バッグ）

再使用禁止

【警告】


1. 使用前に本製品と接続するチューブ類を確実に接続しリークがないことを確かめること。
2. 他の機器と接続して使用する場合は閉塞が起こらないように呼気・排気回路が確保されていることを十分に確認し使用すること。

【禁忌・禁止】


1. 再使用禁止
2. 本製品の水洗い、浸漬、ガス滅菌、蒸気滅菌をしないこと。
[有毒な残留ガスが生じたり呼吸抵抗が危険なレベルにまで増加したりする可能性があるため]

【形状・構造及び原理等】**形状**

マニュアルバッグ

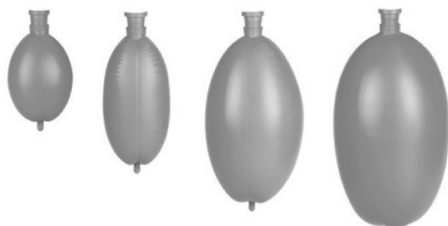

ABS バックアームキット

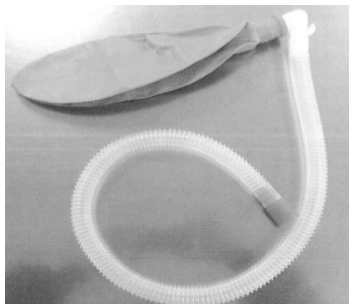**寸法**

マニュアルバッグ容量：0.5 L、1 L、2 L、3 L
マニュアルベンチレーション チューブ：100 cm

構造・構成ユニット

単回使用の麻酔用呼吸バッグ。構成品として麻酔器循環回路部（ABS）、及び接続可能なコネクタ等を含む。

【使用目的又は効果】

麻酔器又は人工呼吸器等に接続し、呼吸管理に用いること。

【使用方法等】

本製品は麻酔回路セット（VS）の付属品として使用される麻酔用呼吸バッグ、及び麻酔器循環回路部である。

麻酔器、及びベンチレータ製造業者が指示する手順に従って、使用前にシステムが適切に機能することを確認すること。

〈使用方法〉

1. 使用前に破損等がなく、回路のすべての接続部、及びコネクタがしっかり接続されていることを確認する。
2. 麻酔器の呼吸嚢取り付け部へ接続する。
3. 麻酔器のモードを確認してから換気を行う。

【使用上の注意】**〈重要な基本的注意〉**

1. 全ての接続が安全にセットされていることを確認すること。
2. 全ての接続部は両手で持って強く押し込む、又は捻って固定し、緩みがないことを確認すること。
3. ABS バックアームキット(製品番号 5063ABS)は、GE Healthcare 社以外の装置に使用しないこと。[その他の装置との動作保証はしていないため]

【保管方法及び有効期間等】**〈保管方法〉**

保管条件

周囲温度：-30℃～70℃

【主要文献及び文献請求先】

1. 薬食安発第 0109004 号「人工呼吸器等回路用フィルターの自主点検について」（平成 14 年 1 月 9 日、厚生労働省）
2. 薬食審査発第 0911004 号・薬食安発第 0911002 号「人工呼吸器回路における人工鼻と加温加湿器の併用に係る添付文書の自主点検等について」（平成 20 年 9 月 11 日、厚生労働省）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】（文献請求先も同じ）

製造販売業者：

* エアライフジャパン合同会社

TEL：0120-951-321（カスタマーサービス）

外国製造業者：

** SunMed Holdings, LLC also trading as AirLife（米国）