

**機械器具（35）医療用はさみ
一般医療機器 はさみ JMDN コード：35325001**

外科剪刀

【警告】

本製品が破損状態にある場合は絶対に使用しないでください。

【禁忌・禁止】

本製品を曲げ、切断、打刻（刻印）等の二次的加工（改造）することは、折損等の原因となるので絶対に行わないでください。

【形状、構造及び原理等】

組成：ステンレス鋼（SUS420J2）

【使用目的、効能又は効果】

外科手術及び診療等に使用するはさみ。

【品目使用等】

組織、布、縫合糸等を切断する設計になっています。

【操作方法又は使用方法】

回転軸のある2枚の刃からなり、切断する材料の上で2枚の刃を閉じることによって操作します。

【使用上の注意】

使用目的にあった手術器械を使用してください。

本品の使用前に、変形や、傷がないか、器具が正常に作動することを確認の上使用してください。

使用前に必ず洗浄・滅菌（保守・点検に係る事項参照）をしてください。

新しい手術器械は不動態皮膜が薄く、長く使用している器械より腐食しやすいので十分注意して取り扱いをしてください。

使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬してください。

塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因になるので出来るだけ使用を避けてください。使用中に付着したときには水洗いをしてください。

電気メスを用いた接触凝固は、術者が感電、火傷をする危険性があり、また、器械の表面を損傷するので、併用しないでください。

本製品の異常に気がついた場合は直ちに使用を中止してください。

本製品は金属製ですので使用方法、使用回数による金属疲労により破損することがあります。

洗浄後乾燥が不十分ですと錆が発生してしまいます。金属どうしが重なり合う部分には十分注意してください。

【保管方法及び有効期間】

貯蔵・保管にあたっては、洗浄をした後、腐食を防ぐために保管期間の長短にかかわらず必ず乾燥してください。

滅菌済みのものを貯蔵・保管するにあたっては、再汚染を防ぐため清潔な場所に保管するとともに、有効保管期間の管理をしてください。

高温・高湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に貯蔵・保管してください。また水漏れや直射日光は避けるよう注意をしてください。

【取り扱い上の注意】

本製品は未滅菌です。

本製品を機能目的以外に使用されますと破損のおそれがあります。本製品は使用時以外空切り等しないでください。

【保守点検に係る事項】

使用後は、出来るだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、職業感染防止のために洗浄・消毒してください。

汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用してください。

洗浄設置（超音波洗浄装置、ウォッシャーディスインフェクタ等）で洗浄するときには可動部分は開放して、汚れが落ちやすいようにバケット等に収納してください。

洗剤の残留がないよう十分にすすぎをしてください。仕上げすぎには浄化水（濾過、蒸留、脱イオン化等）を用いることを推奨します。

洗浄後は腐食防止のために、直ちに乾燥してください。可動部の動きをスムーズにするために、水溶性潤滑剤を塗布することを推奨します。

使用（滅菌）前に、汚れ、傷、曲がり、歯の損傷、可動部の動き等に異常がないか点検をしてください。

点検後、セット・包装をし、高压蒸気滅菌をしてください。

滅菌条件：(1) 温度 121°C 時間 20 分以上

滅菌条件：(2) 温度 126°C 時間 15 分以上

なお、滅菌のためのセット・包装にあたってはラチエット部等の可動部は開放するなど、確実に滅菌できるよう配慮してください。

強アルカリ/強酸性洗剤・消毒剤は、器具を腐食させるおそれがあるので、使用は避けてください。

金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は、器具の表面が破損するので汚物除去及び洗浄時の使用はしないでください。

【包装】

1本（丁）

【主要文献及び文献請求先】

製造販売業者：橋本医療機器製作所

〒979-3121

福島県いわき市小川町西小川字瀧沢109

TEL 0246-83-0011 FAX 0246-83-0074