

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器
JMDN70907000 歯科用研磨器材
レジンポリ

【形状・構造等及び原理等】

形状 円柱状



主成分 アルミナ シリカ ロウ
色調 ピンク色

【使用目的又は効果】

本品は補綴物等の研磨に用いる器材であり、主に床・義歯等に使用される樹脂等の仕上げを目的とする研磨材である。

【使用方法等】

1. デンチャーをペーパー、マイクロポリで整形研磨する
2. レーズを用いて本品をバフに少量付ける
3. 軽く掃くように研磨する
4. 食器洗剤等または、ルージュクリーナーを用い本品を完全に洗い落とす
5. 十分に水洗いをする

研磨方法は通常の方法をとる

【使用上の注意】

研磨後は十分に洗浄を行い本品を完全に洗い落とすこと

本品の研磨作業時の際は、粉塵による人体への影響を避けるために、局所集塵装置、公的機関が許可したマスク等を使用すること

本製品は【使用目的又は効果】**の項に記載の用途以外には使用しないこと

本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと

重要な基本的注意

本品使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、かゆみ、しびれ等の過敏症が現れた患者又は術者は、使用を中止し、医師の診察を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光や暖房器具などの温風の吹き出し口を避け、室温で保管すること。

歯科の従事者以外がふれないように適切に保管管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者	株式会社美須化学研究所
製造業者	同上
住所	〒542-0012 大阪市中央区谷町6丁目2番11号
電話番号	06-6761-4092(代)