

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器
JMDN70907000 歯科用研磨器材
メタルポリ

【形状・構造等及び原理等】

形状 円柱状



主成分 シリカ アルミナ ロウ

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる器材をいう。別に名称を定めるものを除く。

本品は主に補綴物金属の下地研磨又は床義歯等を使用されるレジンの中間研磨に使用する。

識別 茶色（中間仕上げ研磨用粒子）

【使用方法等】

1. レーズを用いて本品をバフ又はブラシに少量付ける
2. 軽く掃くように研磨する
3. 台所用洗剤等を用いて水洗いをし本品を完全に洗い落とす

研磨方法は通常の方法をとる

【使用上の注意】

研磨後は十分に洗浄を行い本品を完全に洗い落とすこと

本品の研磨作業時の際は、粉塵による人体への影響を避けるために、局所集塵装置、公的機関が許可したマスク等を使用すること

本製品は【使用目的又は効果】**の項に記載の用途以外には使用しないこと

本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと

重要な基本的注意

本品使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、かゆみ、しびれ等の過敏症が現れた患者又は術者は、使用を中止し、医師の診察を受けさせること。

【保管方法及び有効期限等】

直射日光や暖房器具などの温風の吹き出し口を避け、室温で保管すること。

歯科の従事者以外がふれないように適切に保管管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者 株式会社美須化学研究所

製造業者 上同

住所 〒542-0012

大阪市中央区谷町6丁目2番11号

電話番号 06-6761-4092(代)