

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療器機
JMDN70907000 歯科用研磨器材
ミクロポリ

【形状・構造等及び原理等】

形状 粉体（粒状）
成分 シリカ
色調 アイボリー

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる器材
本品は主に床義歯に使用されるレジン等樹脂の整形研磨に用いる。

【使用方法等】

1. 本品に少量の水を加え練る
2. スラリー状になったらレーズを用いてバフ又はブラシで研磨する
3. 水洗いをし本品を洗い落とす

研磨方法は通常の方法をとる

【使用上の注意】

本品の取り扱い時、又は研磨作業時の際は、粉塵による人体への影響を避けるために、局所集塵装置、又は必要に応じ公的機関が許可したマスク、保護ゴーグル等を使用すること

本製品は【使用目的又は効果】**の項に記載の用途以外には使用しないこと

本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと

重要な基本的注意

本品使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、かゆみ、しびれ等の過敏症が現れた術者は使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
研磨材使用後は指等の手荒れ防止のためハンドクリームでケアしてください。

【保管方法及び有効期間等】

歯科の従事者以外がふれないように適切に保管管理すること

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者	株式会社美須化学研究所
製造業者	同上
住所	〒542-0012 大阪市中央区谷町6丁目2番11号
電話番号	06-6761-4092(代)