

#### 【形状・構造等及び原理等】

形状 円柱状



主成分 シリカ アルミナ ロウ  
識調 茶色（中間仕上げ研磨用粒子）

#### 【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる器材  
本品は金属の中間研磨に使用する

#### 【使用方法等】

1. レーズを用いて本品をバフに少量付ける
2. 軽く掃くように研磨する
3. 食器用剤等を用いて水洗いをし本品を完全に洗い落とす

研磨方法は通常の方法をとる

#### 【使用上の注意】

研磨後は十分に洗浄を行い本品を完全に洗い落とすこと

本品の研磨作業時の際は、粉塵による人体への影響を避けるために、局所集塵装置、公的機関が許可したマスク等を使用すること

本製品は【使用目的又は効果】\*\*の項に記載の用途以外には使用しないこと

本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと

#### 重要な基本的注意

本品使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、かゆみ、しびれ等の過敏症が現れた患者又は術者は、使用を中止し、医師の診察を受けさせること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

直射日光や暖房器具などの温風の吹き出し口を避け、室温で保管すること。  
歯科の従事者以外がふれないように適切に保管管理すること。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】\*\*

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 製造販売業者 | 株式会社美須化学研究所                   |
| 製造業者   | 同上                            |
| 住所     | 〒542-0012<br>大阪市中央区谷町6丁目2番11号 |
| 電話番号   | 06-6761-4092(代)               |