

レジンポリブルー

【形状・構造等及び原理等】

形状 ペースト状

成分 水 アルミナ 脂肪酸 非イオン系界面活性剤 青色1号

色調 淡青色

【使用目的又は効能】

補綴物等の研磨に用いる器材

本品は義歯に使用されるレジン及び金属の仕上げ研磨材

【使用方法等】

1. 砂整形研磨後のデンチャーを水洗いする
2. 水滴の付いた状態で本品を多めに塗布する
3. レーズを用いて軽く掃くように研磨する
4. 超音波洗浄後水洗いをし本品を完全に洗い落とす

研磨方法は通常の方法をとる

【使用上の注意】

研磨後は十分に洗浄を行い本品を完全に洗い落とすこと

本品の研磨作業時の際は、粉塵による人体への影響を避けるために、局所集塵装置、公的機関が許可したマスク等を使用すること。

本製品は【使用目的又は効果】**の項に記載の用途以外には使用しないこと。

本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

重要な基本的注意

本品使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、かゆみ、しびれ等の過敏症が現れた患者又は術者は、使用を中止し、医師の診察を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

キャップを締め立てた状態で保存する。

歯科の従事者以外がふれないように適切に保管管理すること

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者 株式会社美須化学研究所

製造業者 同上

住所 〒542-0012

大阪市中央区谷町6丁目2番11号

電話番号 06-6761-4092(代)