

ブライトサンド

【形状・構造等及び原理等】

形状 粉体（粒状）

主成分 シリカ

色調 アイボリー（中間研磨粒子）

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる器材

本品は主に義歯床に使用されるレジン等樹脂の整形研磨に用いる。

【使用方法等】

- ブライトサンドに等量の水道水を加える
- ブライトサンド約両手一杯に対しブライトサンドローションをティースプーン約1杯を添加し、かき混ぜる
ブライトローションの量は好みの粘性により加減する。
- レーズを用いてブライトホイール、布バフ又はブラシで2のスラリー状の本品をデンチャー樹脂部に掛けながら研磨をする
- 表面が滑らかになったら研磨を終え、水洗いをして本品を洗い落とす。

研磨方法は通常の方法をとる

【使用上の注意】

本品の取り扱い時、又は研磨作業時の際は、粉塵による人体への影響を避けるために、局所集塵装置、又は必要に応じ公的機関が許可したマスク、保護ゴーグル等を使用すること

本製品は【使用目的又は効果】**の項に記載の用途以外には使用しないこと

本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと

重要な基本的注意

本品使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、かゆみ、しびれ等の過敏症が現れた術者には、使用を中止し、医師の診察を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

湿気の無いところに保管する。

歯科の従事者以外がふれないように適切に保管管理すること

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者 株式会社美須化学研究所

製造業者 同上

住所 〒542-0012

大阪市中央区谷町6丁目2番11号

電話番号 06-6761-4092(代)